



Jaguaribe

Manual do Usuário

Cadeira de Rodas

- ÁGILE HOSPITALAR**
- ÁGILE RECLINÁVEL**
- FIT RECLINÁVEL**
- ÁGILE INFANTIL**
- ÁGILE FAT**
- ÁGILE**
- FIT**

O manual é parte integrante do equipamento, sua leitura é obrigatória.
Sr. Lojista, oriente o consumidor

ÍNDICE

AGRADECIMENTO	03
INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS.....	04
GARANTIA	07
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO.....	08
MONTANDO AS RODAS TRASEIRAS.....	11
MONTANDO AS RODAS DIANTEIRAS	12
ABRINDO A CADEIRA DE RODAS	13
APOIO DE BRAÇOS	14
SAÍDAS LATERAIS (SL)	15
ELEVAÇÕES DE PERNAS.....	16
REGULANDO O APOIO PARA PÉS.....	18
RECLINANDO O ENCOSTO.....	19
APOIO DE CABEÇA	19
ANTI-TOMBO	20
ACIONANDO E REGULANDO OS FREIOS	21
FECHANDO A CADEIRA DE RODAS	22
DESMONTANDO A CADEIRA DE RODAS	23
REGULANDO AS PLACAS TRASEIRAS	24
SUORTE DE SORO.....	25
TABELA DE CARACTERÍSTICAS.....	26
FERRAMENTAS.....	28
CERTIFICADO DE GARANTIA.....	31

Guarde este manual para futuras consultas e garantia do produto
Qualquer dúvida entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente

 (11) 99168-5881

Não jogue este impresso no chão ou em vias públicas.

OBRIGADO POR ESCOLHER A JAGUARIBE!

Olá...

Você acaba de adquirir um produto com a mais alta qualidade e segurança, destinado aos usuários de cadeiras de rodas. A Ortopedia Jaguaribe desde sua fundação oferece grande variedade de produtos, dos populares aos mais específicos e sofisticados, todos com avançada tecnologia.

Nosso objetivo é promover ao usuário uma interação de qualidade de vida com conforto, segurança e praticidade, através de uma grande variedade de produtos disponíveis. Atendendo as mais variadas necessidades, a empresa visa sempre a reintegração do homem na sociedade desde o público jovem ao idoso.



Neste manual, você encontra todas as informações necessárias para a sua segurança e uso adequado do produto. Leia-o atentamente por inteiro antes de iniciar o uso e guarde este manual para consultas futuras e garantia do produto.

Em caso de dúvidas, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente (11) 99168-5881 (WhatsApp).



Guarde a nota fiscal de seu produto, pois a garantia somente é válida com a apresentação da nota fiscal aos Serviços Autorizados Jaguaribe.

Não remova a etiqueta de identificação de seu produto, onde constam informações como código do produto, lote, número de série, fabricante, entre outras informações necessárias caso necessite de algum atendimento ao produto.

Consulte nosso site www.ortopediajaguaribe.com.br para conhecer sobre toda linha de produtos Jaguaribe, acessórios, assistências técnicas entre outras informações.

DICAS AMBIENTAIS

O material utilizado nas embalagens dos produtos é reciclável, para o descarte, separe o papelão e o plástico. Isso auxiliará a coleta seletiva de lixo.

Este produto não deve ser tratado como lixo doméstico, portanto, após o fim de sua vida útil, deve ser descartado em local apropriado.



ATENÇÃO

Não manuseie ou utilize este produto sem antes ler e entender o conteúdo deste manual. Se você não for capaz de entender os avisos e informações contidas neste, contate um profissional da saúde, o distribuidor, um técnico ou o Serviço de Atendimento ao Cliente. Caso contrário podem acontecer danos, tanto ao usuário quanto ao produto. A Ortopedia Jaguaribe não se responsabiliza por acidentes e prejuízos causados em decorrência da má utilização do produto ou da inobservância das advertências contidas neste manual ou que contrariem o bom senso das informações.

IMPORTANTE

Como fabricante de produtos para saúde, a ORTOPEDIA JAGUARIBE comercializa diversos modelos de produtos para melhor atender as necessidades do usuário final. Entretanto, a escolha individual do tipo do produto adequado para cada usuário deve ser feita por um profissional da saúde capacitado para tal seleção.

Os produtos destinam-se exclusivamente a auxiliar ou facilitar a locomoção de pessoas portadoras de deficiência física, dificuldade de movimentação, em recuperação de lesões, fraturas ou pós-operatório. A Ortopedia Jaguaribe não se responsabiliza pela utilização dos produtos a fins ilícitos ou inadequados de utilização.

O produto pode ser conduzido pelo próprio usuário desde que este possua membros superiores capacitados (ativos), controle direcional, capacidade visual e motora suficientes para conduzir de forma adequada e segura o produto a fim de evitar acidentes.

Respeite a capacidade de carga máxima suportada pelos produtos. Vide etiqueta de identificação do produto.

INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

USUÁRIOS E ACOMPANHANTES

- Cuidado ao abrir a embalagem para não avariar o produto.
- Realize a leitura completa do manual do usuário antes da utilização do produto.
- Ao retirar o produto da embalagem analise se existe alguma avaria no produto. Produtos avariados podem causar lesões ao usuário.
- Não utilizar materiais cortantes para abrir a embalagem do produto.
- Em qualquer incapacidade de entendimento das informações deste manual, consulte um especialista ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.
- Este produto destina-se ao uso individual. Portanto, nunca carregue outras pessoas, animais ou crianças sentadas no colo, nos braços da cadeira ou em qualquer outra parte da estrutura.

TRANSPORTE

- Os usuários de cadeira de rodas não devem ser transportados em veículos enquanto estiverem utilizando a cadeira de rodas.
- A Ortopedia Jaguaribe não se responsabiliza por qualquer evento decorrente do transporte público ou carros adaptados para passageiros com acessibilidade.
- A cadeira de rodas não deve ser transportada junto aos passageiros do veículo.
- A cadeira não deve ser transportada sobre o teto de veículos, carrocerias abertas, junto, sobre, sob ou amarrado a outros produtos ou em qualquer lugar exposto ao tempo.
- A cadeira de rodas não deve ser transportada solta balançando em carrocerias ou porta malas, sempre acomode o produto, para que não se movimente durante a locomoção do veículo para evitar causar avarias ou danos a estrutura.

ARMAZENAMENTO

- Armazene seu produto em local seco e longe de umidades, poeiras excessivas, produtos químicos ou qualquer tipo de local que possa danificar quimicamente, biologicamente ou fisicamente as partes ou estrutura do produto, avarias ou danos a estrutura.

DESEMPENHO

- Ao abrir ou fechar os produtos cuidado com os dedos para que não fiquem presos nas estruturas, siga sempre os passos descritos no manual para manusear os produtos.
- Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.
- O desempenho na mobilidade do produto tem variações conforme condições do local que está sendo utilizado.
- Ao utilizar o produto verificar sua funcionalidade e se o mesmo atende as expectativas do usuário.
- Troque o assento e encosto quando apresentarem rasgos ou deterioração acidentais ou pela ação do tempo.
- Em caso de locação sempre higienizar o produto com pano limpo e seco ou levemente umedecido em álcool 70°. Sempre revisar totalmente o produto e suas partes antes da próxima locação, garantindo sua adequada utilização.
- Não fume sobre o produto, nem o deixe próximo a fogueiras, carvão em brasa, fósforos, cigarros, isqueiros, ou a qualquer situação em que o produto entre em contato com fontes de chamas (fogo).
- Os freios que acompanham a cadeira de rodas são para estacionamento (manter a cadeira parada), por isso não utilize os freios para reduzir a velocidade da cadeira (freio dinâmico) quando em movimento, isso causará o desgaste prematuro do freio e dos pneus podendo causar acidentes.
- Após alterar o posicionamento ou regulagem de qualquer parte do produto, sempre certifique-se que as partes estejam devidamente fixas conforme instruções contidas nos manuais e se as ações pertinentes a regulagem está garantindo o correto funcionamento do produto, realize as regulagens e ajustes conforme instruções do manual. Caso a ação de ajuste ou regulagem não esteja de acordo com o proposto, não utilize o produto, refaça a operação até que o produto esteja devidamente ajustado conforme indicado no manual.
- Para sua maior segurança, sempre se certifique que as partes encaixáveis estejam devidamente fixas conforme orientações do manual.
- Não use roupas longas que tenham babados, cordões, cadarços, tiras, cintos soltos, ou detalhes que fiquem suspensos e possam enroscar, entrar, ou prender nas partes articuladas e móveis da cadeira durante a sua movimentação.
- Cuidado ao usar roupas com detalhes tipo missangas, ilhós, pedrarias, tachas, pontas ou quaisquer outros adereços que possam rasgar ou esfolar os tecidos (assento, encosto e almofada) do produto.
- Não pendure bolsas, sacolas, mochilas ou qualquer outro utensílio nos produtos. Isto pode alterar o centro de gravidade do produto e provocar seu tombamento.

USUÁRIO

- Nunca utilize sua cadeira sem o acoplamento correto do cinto de segurança (para cadeiras com cinto de segurança).
- Não utilize os apoios para os pés como suporte para entrar ou sair da cadeira de rodas, pois a cadeira de rodas pode tombar.
- Não incline a cadeira de rodas sem ajuda ou assistência de terceiros, pois a cadeira de rodas pode tombar.
- Não tente alcançar objetos onde seja necessário inclinar-se para trás, para frente ou para os lados, pois a cadeira de rodas pode tombar.
- Não tente alcançar objetos no chão localizado entre os joelhos, pois a cadeira de rodas pode tombar.
- Mantenha os pneus INFLÁVEIS sempre calibrados conforme as orientações do fabricante especificadas na lateral dos pneus.
- Não suba ou desça rampas com inclinações superiores à 8°.
- Não utilize a cadeira de rodas em escadas rolantes ou quaisquer outros tipos de escadas.
- Não utilize a cadeira de rodas em ruas, avenidas, estradas e rodovias. Trafegue somente nas vias para pedestres (faixa de pedestre, calçadas).

- Tenha cuidado ao trafegar em locais escuros ou pouco iluminados. A cadeira de rodas não possui dispositivos de iluminação como faróis, lanternas, setas ou faixas refletivas.
- Não transite em pisos que estejam molhados, alagados, cobertos com gelo, neve ou óleo.
- Não transite sobre carpetes e tapetes, a mobilidade da cadeira de rodas poderá ser prejudicada e o material de certos carpetes e tapetes podem causar acidentes e/ ou danos ao produto.
- Não transite em superfícies irregulares ou fofas como grama, areia, pedra, cascalho, terreno lamacento, terra, paralelepípedo ou qualquer outro pavimento irregular, a mobilidade da cadeira de rodas será prejudicada e poderá causar acidentes e/ ou danos ao produto.
- Não tente transpor vias alagadas, poças de água, rios, córregos ou qualquer outro local que possa molhar o produto.
- Não tente transpor obstáculos, meio-fio ou desníveis de piso sozinho, pois a cadeira de rodas pode tombar causando danos ao usuário e ao equipamento. Sempre peça auxílio para alguém capacitado.
- Não permita que sua cadeira de rodas entre em contato com produtos líquidos como água do mar, água sulfurosas, água termal, produtos químicos ou corrosivos de qualquer espécie. Caso isto ocorra, seque o produto imediatamente com um pano limpo e seco.
- Não tente levantar a cadeira através das partes móveis e/ou removíveis (essas partes são descritas no manual).
- Não utilize a cadeira de rodas para puxar ou rebocar qualquer outro tipo de veículo ou produto.
- Este produto não se destina a qualquer prática de esporte ou dança;
- Nunca remova ou utilize virado para cima os dispositivos anti-tombo (cadeiras que possuem anti-tombo).

PRESERVAÇÃO/MANUTENÇÃO

- Não utilize peças, acessórios ou adaptações que não forem autorizadas pela ORTOPEDIA JAGUARIBE.
- Lubrifique uma vez por mês eixos, garfos e rolamentos com e SOMENTE COM graxa de lítio branca.
- Verifique uma vez por mês o aperto de porcas e parafusos de toda a estrutura.
- Troque os revestimentos do assento e encosto assim que apresentarem rasgos ou deterioração pela ação do tempo.
- Para limpeza da cadeira utilize somente um pano limpo e seco ou levemente umedecido em álcool 70°.
- A cadeira de rodas deve ser utilizada em ambientes com a temperatura em torno de 5° a 45° Celsius. Caso esta seja utilizada em outras condições, pode haver desgaste de peças prematuramente. Ex: utilizar a cadeira de rodas em locais muito quentes pode acarretar o amolecimento da borracha do pneu, gastando-o mais rápido.
- Não deixe o produto exposto por longos períodos aos raios solares.
- Não exponha a cadeira a chuva ou jatos de água. Caso isso ocorra, seque imediatamente com um pano limpo e seco para evitar qualquer tipo de danos ao produto.
- As ferramentas necessárias para os ajustes e regulagens contidos neste manual não estão inclusas com o produto.

ROTULAGEM

- Não remova a etiqueta de identificação de seu produto, onde constam informações como código do produto, lote, número de série, fabricante, entre outras informações necessárias caso necessite de algum atendimento ao produto.



ATENÇÃO

Este manual serve para mais de um modelo de produto, alguns recursos descritos neste manual podem servir apenas para modelos específicos. As imagens são meramente ilustrativas.

A Ortopedia Jaguaribe se reserva o direito de alterar qualquer parte deste manual sem aviso prévio.

GARANTIA

Procure seguir os procedimentos descritos abaixo para que a garantia da sua cadeira seja efetivada e tenha sua validade garantida.

CONDIÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DA GARANTIA:

1. A montagem do produto deverá ser corretamente executada seguindo as instruções do Manual de Instruções;
2. Apresentação de Nota Fiscal de Compra e o Manual de Instruções devidamente preenchidos e sem rasuras;
3. As orientações quanto ao uso, manutenção e cuidados deverão ser devidamente respeitadas;
4. A garantia alcança somente o primeiro proprietário do produto devidamente identificado pela Nota Fiscal de Compra e terá como termo inicial a data de compra descrita na Nota Fiscal (dentro do prazo de 12 meses);
5. Peças substituídas e reparos feitos no período de garantia não acarretam sua prorrogação, sendo que esta terá validade sempre a partir da data de aquisição do produto devidamente identificado pela Nota Fiscal de Compra;
6. Alterações, modificações ou adaptações feitas no produto por terceiros sem a devida autorização do fabricante; anulam automaticamente a garantia do produto.

O QUE A GARANTIA COBRE


A garantia cobre todos os reparos necessários em decorrência de falhas de material (estrutura ou peças) ou fabricação, as peças reconhecidas como defeituosas serão substituídas por novas pelo revendedor do produto autorizado ou pela empresa Ortopedia Jaguaribe.

O QUE A GARANTIA NÃO COBRE:

1. Despesa com transporte e remoção do produto para conserto ou manutenção;
 2. Despesas com limpeza, regulagem, reaperto e alinhamentos correrão por conta do proprietário;
 3. Os itens de desgaste natural em função do uso. As despesas com as substituições periódicas correrão por conta do proprietário. São considerados itens de desgaste natural:
 - Pneus;
 - Câmaras de ar;
 - Rolamentos;
 - Assentos, encostos e almofadas;
 - Manoplas;
 - Freios;
 - Quaisquer outros componentes que sofram atrito com outras partes ou fadiga de material ocasionado pelo uso do produto (partes móveis).
 4. A garantia se restringe única e exclusivamente ao produto, não cobrindo qualquer outra despesa decorrente de avaria como: transporte, hospedagem, alimentação, falta de uso do produto ou que não esteja descrito neste manual;
 5. Reparos ou substituições de peças que não sejam originais;
 6. Defeitos decorrentes de acidentes ou exposição do produto a condições impróprias;
 7. Defeitos provocados pela transformação, modificação, adaptações não autorizadas ou em decorrência do uso fora das especificações contidas neste manual.
 8. Produtos comprados "no estado" em saldos, de segunda mão ou usados;
 9. Defeitos decorrentes da influência de intempéries, ou de contato com substâncias químicas, corrosivas ou abrasivas, causados por atritos durante o uso como riscos e amassados de acidentes;
 10. Quebra de qualquer peça ou acessório decorrente do abuso de utilização, tais como subir ou descer calçadas sem meio fio rebaixado, degraus, exceder o peso máximo descrito no manual, etc.
- A inobservância de qualquer das recomendações contidas no Manual do Proprietário acarretará na perda total da garantia do produto.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO


ÁGILE / ÁGILE FAT

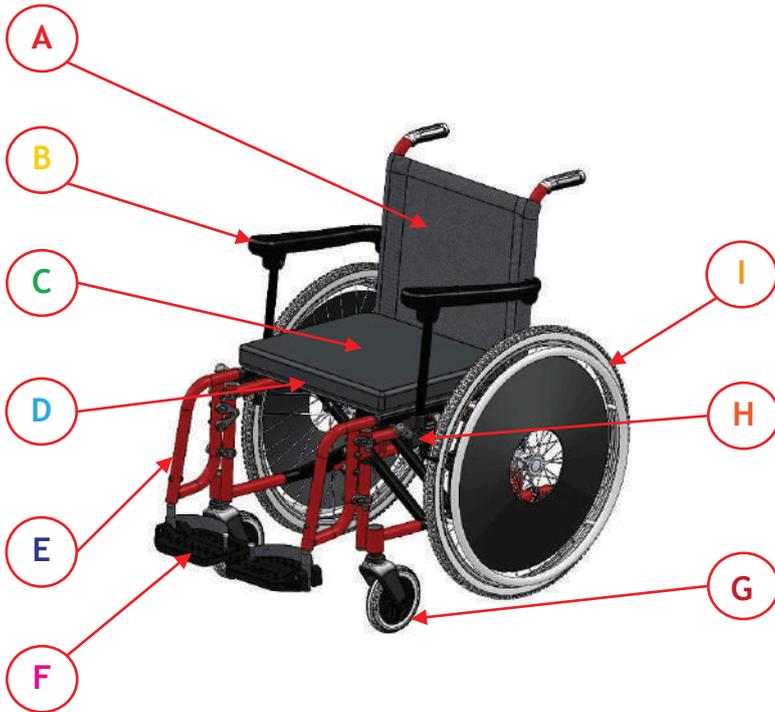


	DESCRIÇÃO	QTD
A	Encosto	01
B	Apoio para braço	02
C	Almofada	01
D	Assento	01
E	Saída Lateral (SL)	02
F	Apoio para pé	02
G	Garfo Dianteiro com rodas	02
H	Freio	02
I	Roda traseira	02

ÁGILE RECLINÁVEL

	DESCRIÇÃO	QTD
A	Encosto	01
B	Apoio para braço	02
C	Almofada	01
D	Assento	01
E	Elevação de perna	02
F	Apoio para pé	02
G	Garfo Dianteiro com rodas	02
H	Freio	02
I	Roda Traseira	02
J	Apoio de Cabeça	01
K	Anti - Tombo	02

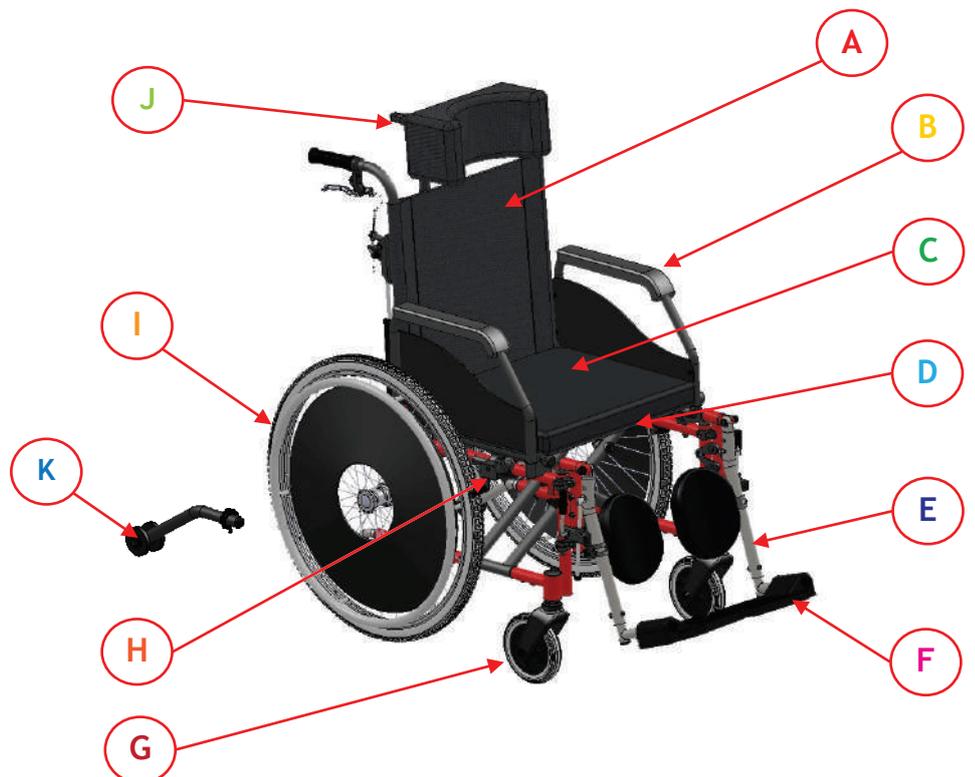


ÁGILE HOSPITALAR

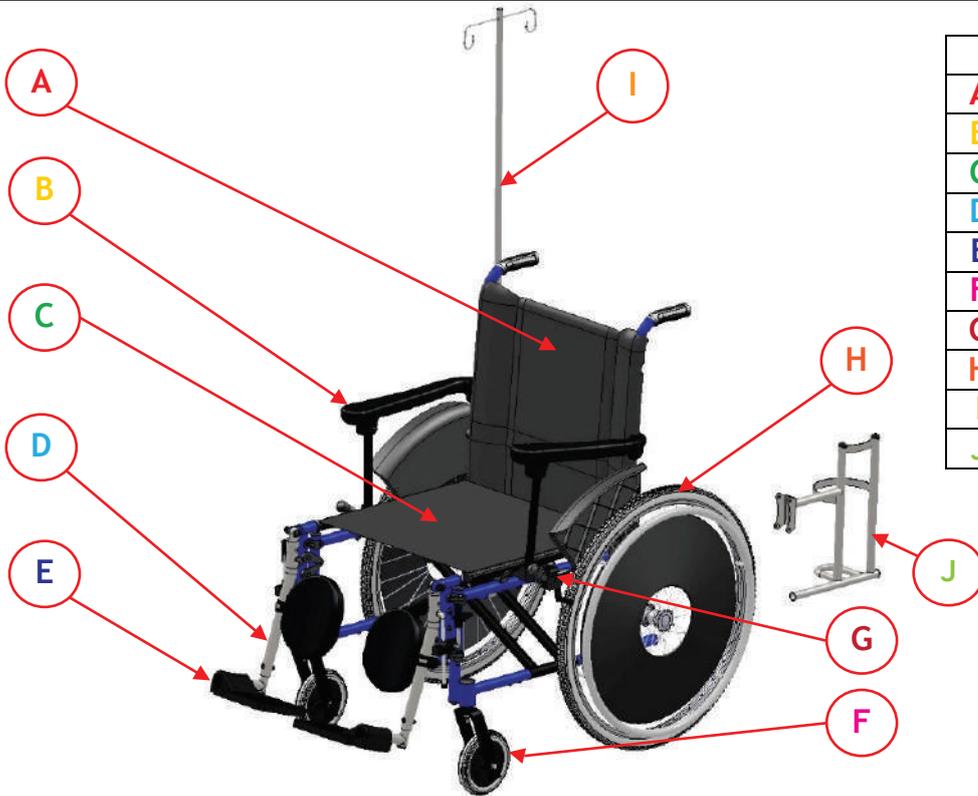


	DESCRIÇÃO	QTD
A	Encosto	01
B	Apoio para braço	02
C	Assento	01
D	Elevação de perna	02
E	Apoio para pé	02
F	Garfo Dianteiro com rodas	02
G	Freio	02
H	Roda traseira	02
I	Suporte de Soro	01
J	Suporte de Oxigênio	01

ÁGILE INFANTIL

	DESCRIÇÃO	QTD
A	Encosto	01
B	Apoio para braço	02
C	Almofada	01
D	Assento	01
E	Saída lateral (SL)	02
F	Apoio para pé	02
G	Garfo Dianteiro com rodas	02
H	Freio	02
I	Anti-tombo	02
J	Roda traseira	02

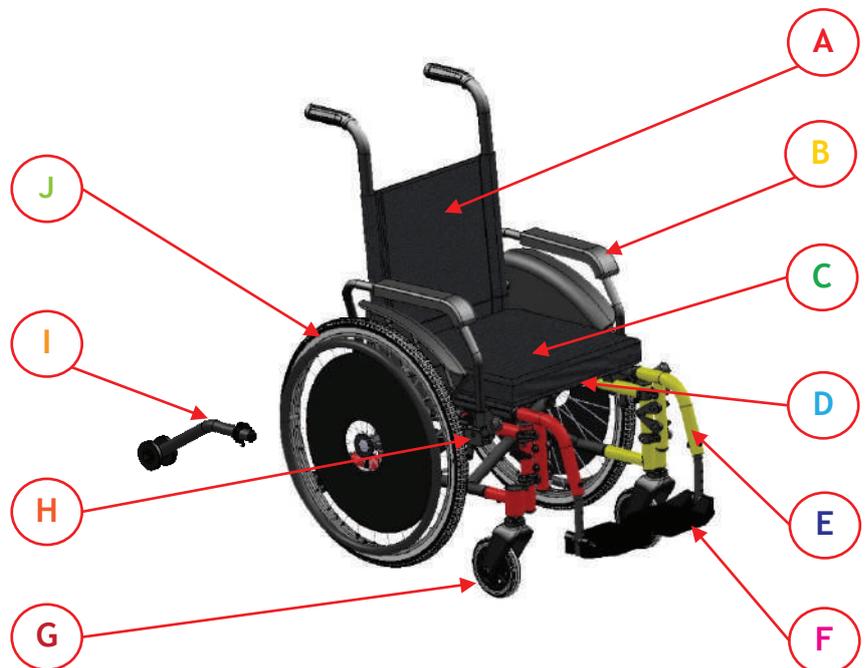

FIT

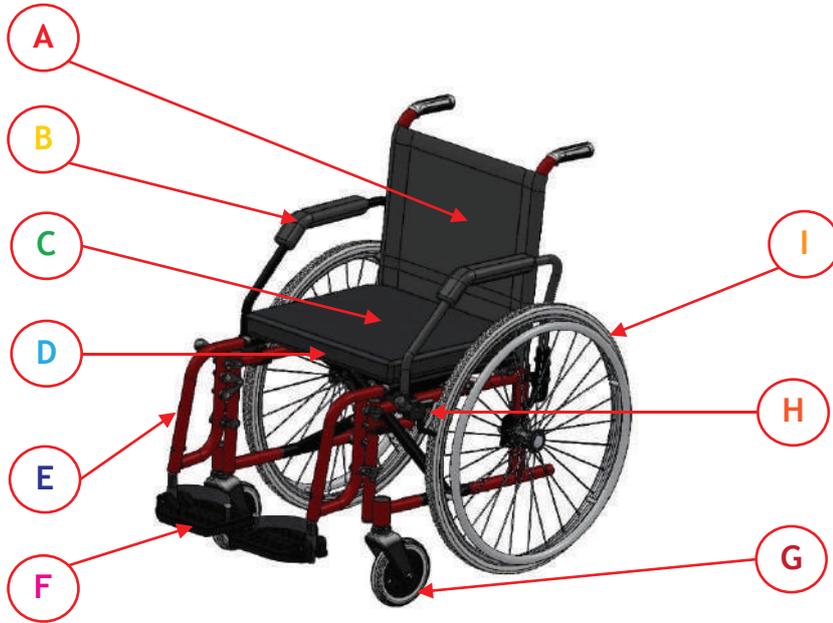

	DESCRIÇÃO	QTD
A	Encosto	01
B	Apoio para braço	02
C	Almofada	01
D	Assento	01
E	Saida lateral (SL)	02
F	Apoio para pé	02
G	Garfo Dianteiro com rodas	02
H	Freio	02
I	Roda Traseira	02

FIT RECLINÁVEL

	DESCRIÇÃO	QTD
A	Encosto	01
B	Apoio para braço	02
C	Almofada	01
D	Assento	01
E	Elevação de perna	02
F	Apoio para pé	02
G	Garfo Dianteiro com rodas	02
H	Freio	02
I	Roda Traseira	02
J	Apoio de Cabeça	01
K	Anti - Tombo	02



ATENÇÃO

Leia atentamente as instruções do manual antes do manuseio ou uso do produto. Guarde o manual para futuras consulta e garantia do produto. Ao receber retire o produto da caixa e verifique se está em perfeito estado e se contém as partes descritas na apresentação dos produtos acima. Inicie após esses procedimentos a montagem de seu produto conforme manual de instruções.



MONTANDO AS RODAS TRASEIRAS

Ao retirar o produto da embalagem, repare que o produto está desmontado. Monte-o seguindo corretamente todos os passos deste manual para garantir o correto funcionamento de sua cadeira de rodas e evitar acidentes.

Para montar as rodas traseiras observe que no centro das rodas há uma calota de acionamento do eixo de desmontagem rápida (eixo, quick-release). Segure a roda de forma que seja possível acionar o eixo, empurrando a calota para dentro da roda, observe a representação na ilustração ao lado.

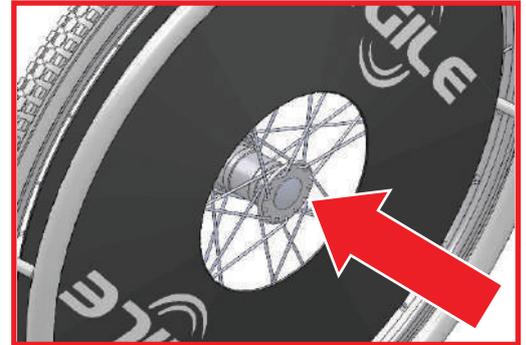


Imagem Ilustrativa

Acionando calota do eixo Quick

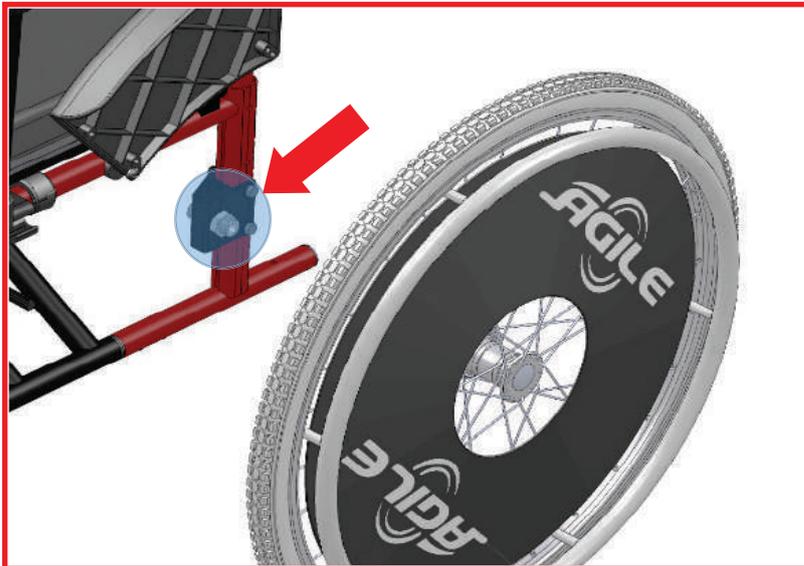


Imagem Ilustrativa

Localização da bucha da placa da roda


Agora observe que na placa da roda traseira, há uma bucha de fixação para o eixo quick.

Segure a roda e pressione a calota do eixo quick, em seguida introduza o eixo na bucha até que as esferas da extremidade do eixo ultrapassem totalmente a bucha, solte a pressão sobre a calota, verifique puxando para fora, se o travamento da roda está feito corretamente, caso contrário repita a operação até que a roda esteja devidamente fixada na cadeira.




ATENÇÃO

Para sua maior segurança, sempre se certifique que as rodas traseiras estão devidamente fixadas, para isso verifique se as esferas na extremidade do eixo quick ultrapasaram totalmente a bucha.

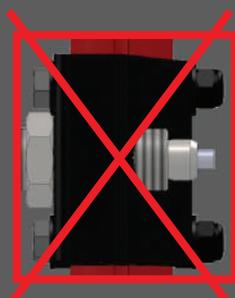

Detalhe de como NÃO devem ficar as esferas do eixo quick, sem ultrapassar a bucha

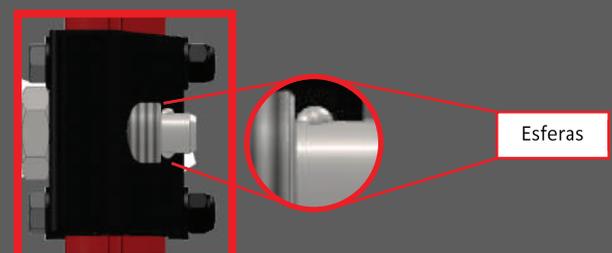

Detalhe das esferas ultrapassando totalmente a bucha

MONTANDO AS RODAS DIANTEIRAS


Para montar as rodas dianteiras (garfos), observe que os garfos também são equipados com eixos de desmontagem rápida (sistema quick-release). Para montar, pressione o eixo quick, que se encontra na parte inferior dos garfos, como demonstrado na imagem ao lado.

Após acionar o eixo quick do garfo, levante a estrutura de sua cadeira de rodas e introduza os garfos nas caixas de rolamentos até o fim, solte a pressão sobre o eixo quick e certifique-se que os garfos estão devidamente fixados puxando-os para baixo, caso contrário repita a operação até que os garfos estejam devidamente fixos na cadeira. Observe a demonstração na ilustração ao lado.




Acionando o eixo Quick do garfo

Sempre que for preciso, retire a calota protetora da caixa de rolamentos para verificar se os garfos estão devidamente fixados, observando se as esferas dos eixos quick do garfo ultrapassaram totalmente os rolamentos. Após a verificação recoloca a calota, pois ela protege os rolamentos de sujeiras e também da umidade.

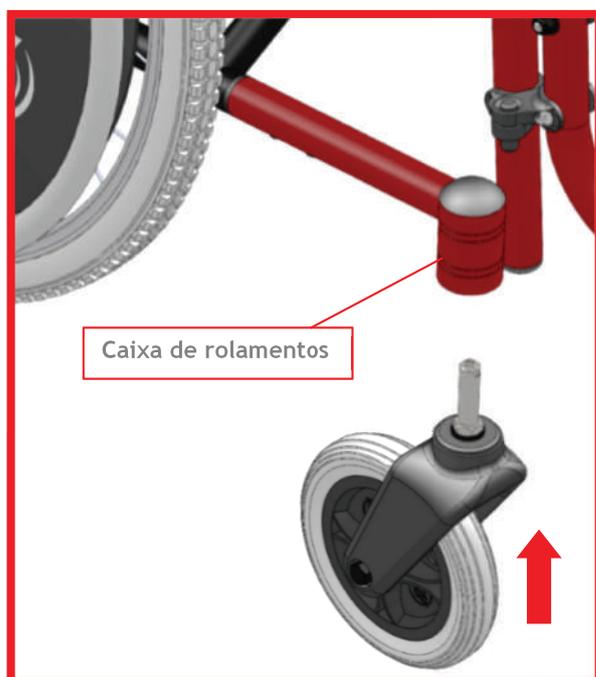

Montando o garfo na caixa de rolamentos

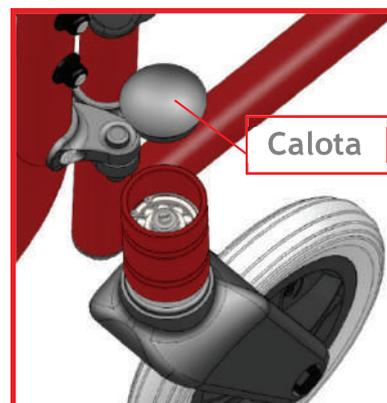

Detalhe da retirada da calota da caixa de rolamentos




ATENÇÃO

Para sua maior segurança, sempre certifique-se que os garfos estão devidamente fixados, para isso verifique se as esferas na extremidade do eixo quick ultrapassaram totalmente os rolamentos.

ABRINDO A CADEIRA DE RODAS

Para abrir a sua cadeira de rodas, siga corretamente os passos abaixo.

Posicione-se ao lado de sua cadeira de rodas e com as palmas das mãos empurre o tubo do assento para baixo, até que se encaixe nas guias de encaixe do assento. Observe nas ilustrações abaixo.

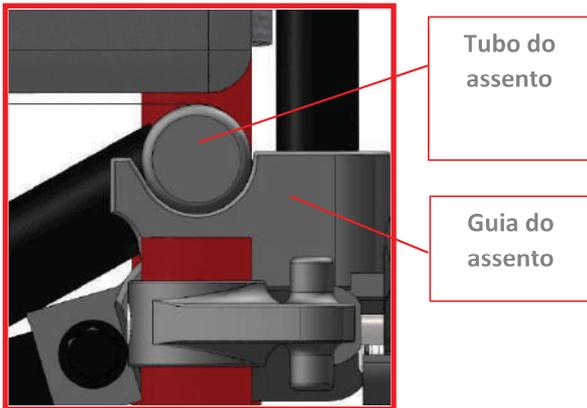

Detalhe do tubo do assento na guia



Detalhe da abertura da cadeira

Imagem Ilustrativa



ATENÇÃO

Mantenha os dedos levantados e as mãos por cima do assento para evitar que fiquem prensados no tubo ou protetor lateral ao abrir a cadeira.

Após abrir sua cadeira de rodas, posicione a almofada sobre o assento (apenas produtos que possuem almofada). Repare nas duas faixas de velcro existentes no assento e na almofada. Fixe ambas as faixas do assento e da almofada para que fiquem firmes. A parte de abertura de zíper da almofada deve ser voltada para o lado de trás da cadeira.



Colocando a almofada

Imagem Ilustrativa

APOIO DE BRAÇOS

Levantando o apoio para braço¹

Para levantar o apoio para braço articulado de sua cadeira de rodas, basta puxá-lo para cima até que fique paralelo ao encosto, em seguida articule o tubo de apoio para baixo.

Para abaixar os apoios de braços siga a ordem inversa e certifique-se que o tubo de apoio de braços esteja encaixado corretamente na guia. Observe a ilustração abaixo.



Imagem Ilustrativa

Levantando o apoio de braços

Colocando e retirando o apoio para braço removível²

Para remover o apoio para braços de sua cadeira de rodas, basta puxá-lo para cima até que as pontas saiam totalmente das guias.

Para colocar os apoios de braços siga a ordem inversa e certifique-se que as pontas encaixaram corretamente nas guias. Observe a ilustração abaixo.



Detalhe das guias

Imagem Ilustrativa

Retirando o apoio de braços

Nota 1 - Apenas para modelos Ágile, Ágile Fat e Ágile Hospitalar.

Nota 2 - Apenas para modelos Ágile Reclinável e Fit Reclinável.

Escamoteando o apoio para braço³

Para levantar o apoio para braço articulado de sua cadeira de rodas, basta puxá-lo para cima até que fique paralelo ao encosto.

Para abaixar os apoios de braços siga a ordem inversa e certifique-se que o tubo de apoio de braços esteja encaixado corretamente na guia. Observe a ilustração abaixo.



Imagem Ilustrativa

Levantando o apoio de braços



ATENÇÃO

Para sua maior segurança, sempre certifique-se que os apoios de braços encaixaram corretamente até o final das guias.

SAÍDAS LATERAIS (SL)

Saídas laterais articuladas e removíveis.

Sua cadeira de rodas é equipada com saídas laterais (SL) articuladas e/ou removíveis.

Para montar os SLs, encaixe-os nos pinos guias (superior e inferior) que estão localizados na parte frontal da cadeira (faça apenas a força necessária para encaixar, qualquer força excessiva pode danificar os pinos guias), note que nos SLs existem dois fixadores horizontais com furos guia, onde devem ser colocados os pinos guias frontal da cadeira de rodas. Observe na imagem ao lado.

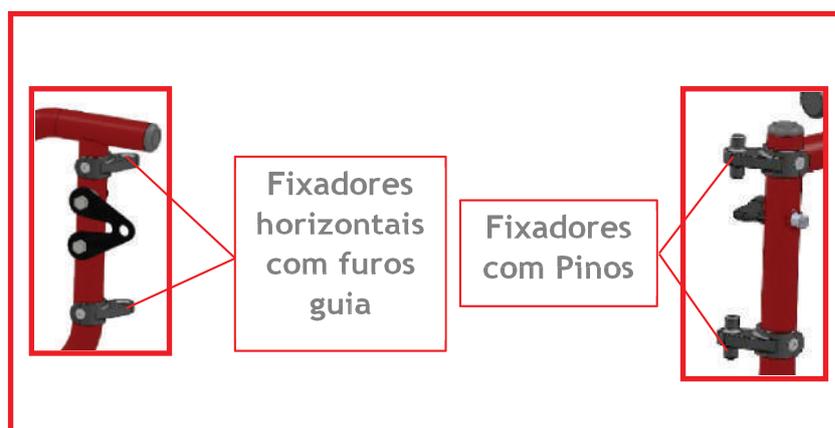


Imagem Ilustrativa

Detalhe dos fixadores

Observe na imagem ao lado.

Após encaixar os fixadores do SL na estrutura, gire os SLs para dentro da estrutura de sua cadeira de rodas até que o SL trave na posição frontal da estrutura. Na estrutura frontal de sua cadeira de rodas existe um pino, trava lateral, com objetivo de fixar os SLs na posição frontal, ele será acionado pela placa de travamento automaticamente quando o SL for girado, travando os SLs e possibilitando que fiquem fixos na posição adequada a sua utilização. Observe na imagem abaixo.



Detalhe da montagem e articulação do SL

Ao entrar ou sair da cadeira de rodas é necessário articular o apoio para pés, para isso puxe a ponta do apoio para pés para cima até que ele fique na posição vertical, para retornar à posição original basta empurrá-lo para baixo até o fim deixando o pedal na posição horizontal. Observe na imagem abaixo.



Articulando o pedal

ELEVAÇÕES DE PERNAS⁴

O sistema de elevação de pernas com haste, possibilita um posicionamento das pernas com precisão e com um funcionamento muito simplificado. Para acionar a elevação de pernas puxe a elevação para cima soltando na posição desejada, não é necessário acionar a alavanca lateral para subir a elevação. Observe na imagem a seguir.



Subindo a elevação

Para abaixar as elevações PUXE a haste de acionamento para trás, imediatamente as elevações ficam destravadas e podem ser abaixadas com a mão. SEMPRE acione a haste ANTES de abaixar as elevações.



Imagem Ilustrativa

Acionando a haste da elevação

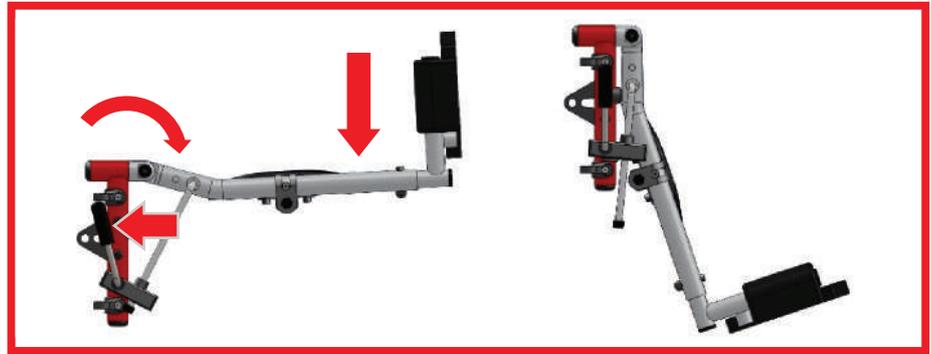


Imagem Ilustrativa

Descendo a elevação

ATENÇÃO

Sempre que for regular ou abaixar a elevação de pernas, mantenha as mãos longe das articulações, para evitar acidentes. Utilize sempre a haste de Acionamento para abaixar as elevações de pernas. Sempre que for necessário movimentar a elevação de pernas, fique atento com o peso das pernas sobre os apoios de pernas, para não causar nenhum tipo de acidente. NUNCA tente abaixar a elevação sem acionar a haste, isso pode danificar permanentemente o sistema de elevação. Não se apoie ou faça força excessiva nas hastes e apoios.

Ao entrar ou sair da cadeira de rodas é necessário articular o apoio para pés e a panturrilha, para isso, puxe a ponta do apoio para pés para cima até que ele fique na posição vertical, para retornar à posição original basta empurrá-lo para baixo até o fim deixando o pedal na posição horizontal. Para articular o apoio de panturrilha puxe-o para frente até que fique paralelo ao tubo da lateral, para retornar a posição original basta empurrá-lo para trás.



Imagem Ilustrativa

Articulando o apoio de pés e o apoio de panturrilhas

REGULANDO O APOIO PARA PÉS

Para um melhor funcionamento do SL e de sua elevação de pernas, é necessário que a altura do apoio de pés esteja devidamente regulada com a necessidade de cada usuário. Para efetuar a regulagem da elevação solte o parafuso fixador, mova o suporte do apoio de pés até a regulagem desejada, recoloque o parafuso e aperte novamente até que esteja devidamente fixado.



Imagem Ilustrativa

Regulando apoio de pés

Para regular a altura do apoio para pés do SL solte o parafuso fixador, mova o suporte do apoio de pés até a regulagem desejada, recoloque o parafuso e aperte novamente até que esteja devidamente fixado.



Imagem Ilustrativa

Regulando apoio de pés



ATENÇÃO

Sempre que for regular a altura dos apoios de pés ou de pernas, fixe os parafusos corretamente.

RECLINANDO O ENCOSTO⁵

Para reclinar o encosto, acione os dois manetes simultaneamente localizados abaixo das manoplas. Mantenha os manetes pressionados e coloque o encosto na posição desejada, em seguida solte os manetes para travar o encosto. Durante este procedimento será necessária força suficiente para sustentar o peso que o tórax do usuário estará exercendo sobre o encosto da cadeira de rodas.

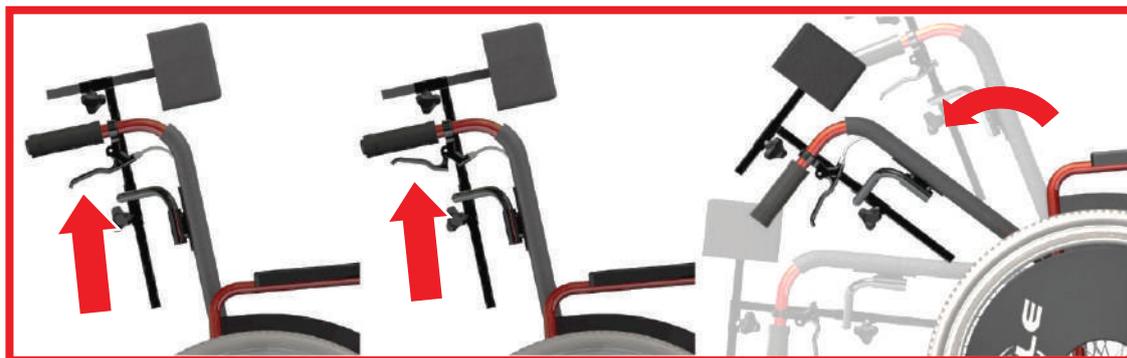


Imagem Ilustrativa

Regulando apoio de pés



ATENÇÃO

Em hipótese alguma o posicionamento do encosto poderá ser executado pelo usuário, sempre deverá ser feito por outra pessoa posicionada atrás da cadeira. Para que seja feito o reclínio perfeitamente, acione os dois manetes ao mesmo tempo. Em hipótese alguma, tente reclinar o encosto sem acionar os dois manetes, ou acionando apenas um dos manetes, isso poderá danificar permanentemente a estrutura de sua cadeira de rodas.

APOIO DE CABEÇA⁶

Monte o tubo do esticador do encosto nos encaixes que se encontram na parte de trás do encosto de sua cadeira de rodas, empurre-os para baixo até que cheguem ao final do encaixe.



Imagem Ilustrativa

Montando o apoio de cabeça

Ampliação


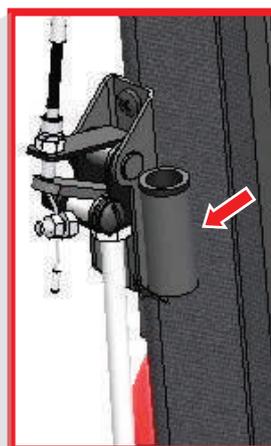


Imagem Ilustrativa

Detalhe do encaixe do apoio de cabeça


O apoio de cabeça pode ser regulado em altura ou profundidade. Para regular, gire o manipulador no sentido anti-horário até que o apoio de cabeça fique totalmente livre, em seguida posicione o apoio de cabeça na posição desejada e gire o manipulador no sentido-horário fixando novamente o apoio de cabeça.

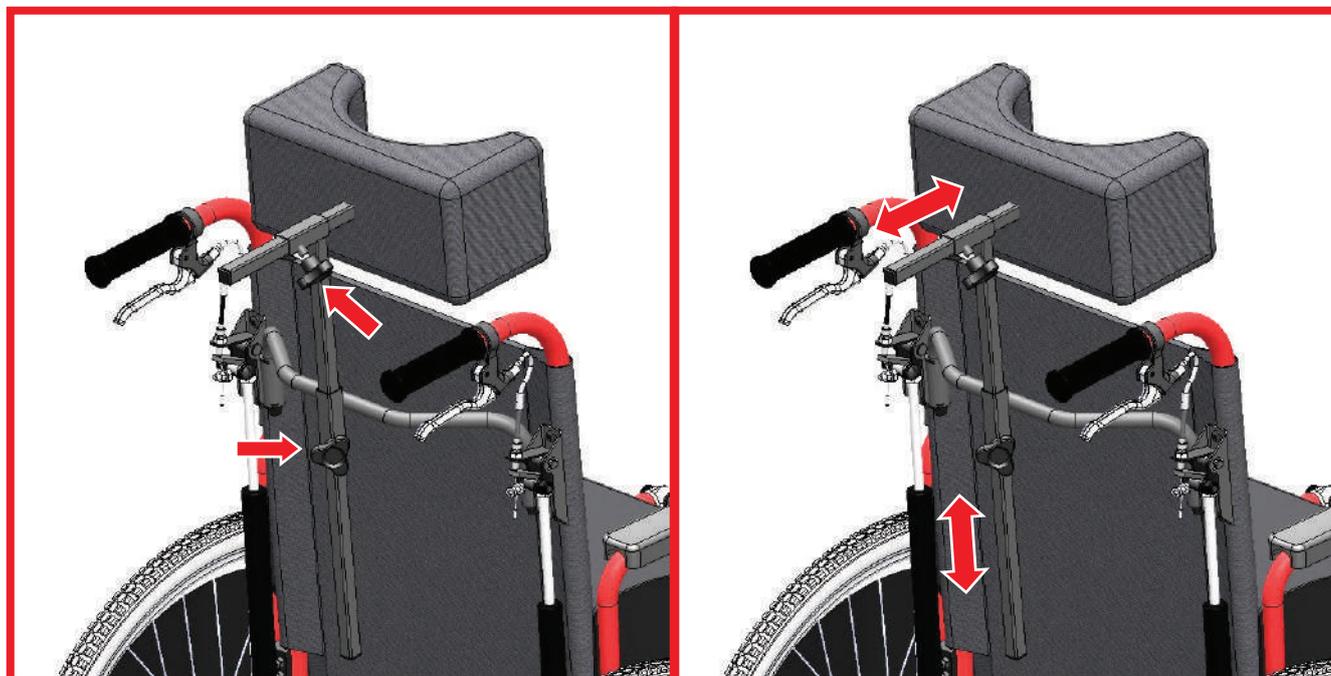


Regulando apoio de cabeça

ANTI-TOMBO⁷

Para uma maior segurança, sua cadeira é equipada com anti-tombos reguláveis, que devem **SEMPRE** estar posicionados virados para o chão. Os anti-tombos são removíveis e podem ser posicionados também para cima, com objetivo de facilitar a transposição de obstáculos como calçadas e saliências. Para isso, remova o pino trava e gire-o anti-tombo para cima. Transponha o obstáculo desejado. Em seguida recoloca o anti-tombo na posição para baixo e introduza novamente o pino trava.

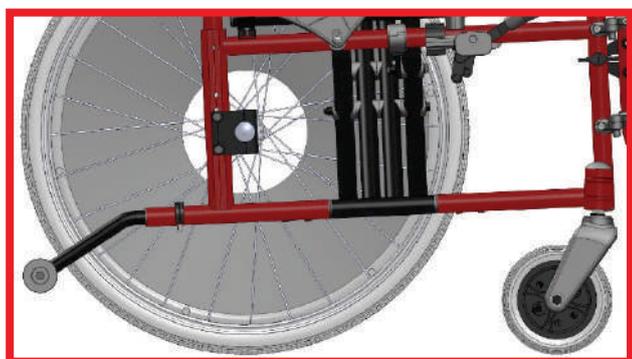

Anti-tombo na posição original

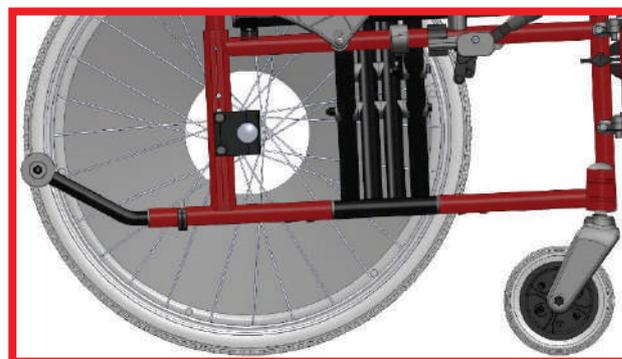


Anti-tombo na posição vertical




ATENÇÃO
NÃO locomova ou recline a sua cadeira de rodas sem que a roda do anti-tombo esteja posicionada para baixo, somente posicione-o para cima quando for transpor algum obstáculo, após isso, posicione o anti-tombo junto ao chão novamente.

ACIONANDO E REGULANDO OS FREIOS

Em cada lado da estrutura lateral de sua cadeira de rodas, estão localizados os freios. Eles devem ser acionados sempre que a cadeira de rodas estiver estacionada. Para acioná-los, basta empurrar para frente as alavancas de acionamento, para desacioná-los puxe as alavancas para trás.

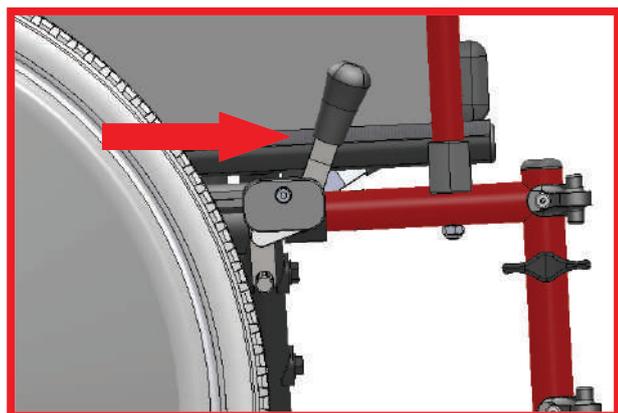

Freio desacionado

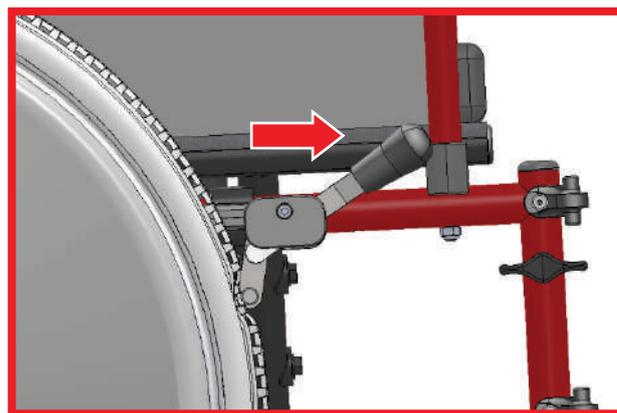


Freio acionado




ATENÇÃO

Para verificar se realmente sua cadeira de rodas está devidamente freada, observe a deformação dos pneus causada pelas hastes dos freios, após o acionamento.

Com as regulagens da roda traseira e com o uso contínuo dos freios, eles podem perder a eficiência de seu acionamento. Para evitar que isso aconteça, os freios são equipados com hastes de regulagem. Para regular os freios, solte o parafuso fixador dos freios (NÃO É NECESSÁRIO REMOVER), mova as hastes para posição adequada e em seguida aperte novamente.

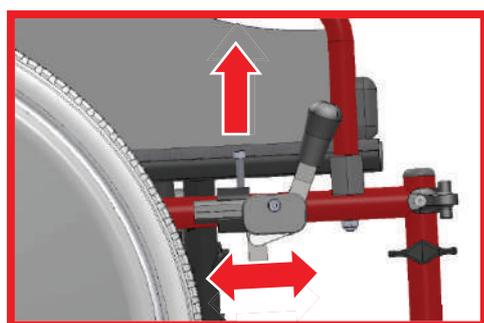

Regulando o freio

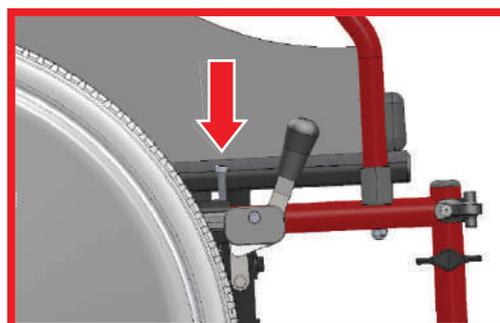

Regulando o freio

ATENÇÃO

Após alterar o posicionamento dos freios, certifique-se de que os freios estejam freando corretamente não permitindo o deslocamento da cadeira ao estarem acionados, caso isto não esteja acontecendo não utilize a cadeira de rodas. Refaça a regulagem até os freios estarem devidamente ajustados.

Aperte bem os parafusos para que não ocorram quaisquer acidentes decorrentes de peças soltas.

Os freios que acompanham a cadeira são para estacionamento (manter a cadeira parada), por isso não utilize os freios para reduzir a velocidade da cadeira (freio dinâmico) isso causará o desgaste prematuro do freio e pneus e podem ocorrer acidentes.

Para diminuir a velocidade da cadeira utilize os aros das rodas (os mesmos utilizados para mover a cadeira) segurando-os com as mãos.

FECHANDO A CADEIRA DE RODAS

Para fechar sua cadeira, comece retirando o esticador do encosto puxando-o para cima (apenas para produtos que possuem esticador de encosto), em seguida levante os apoios de panturrilhas colocando-os na posição vertical (apenas para produtos que possuem apoio de panturrilha), coloque também na posição vertical os apoios de pés. Para facilitar o fechamento mantenha as elevações de pernas abaixadas (apenas para produtos que possuem elevação de pernas).



Imagem Ilustrativa

Retirando Esticador de encosto

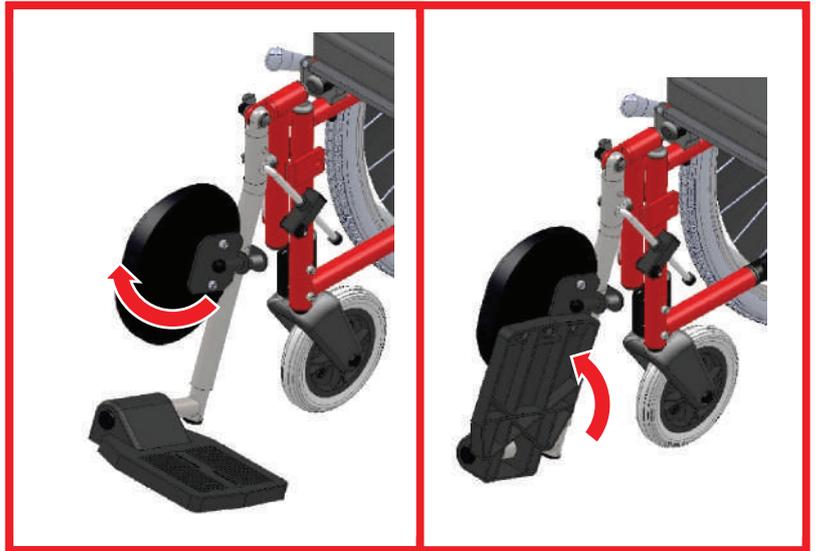


Imagem Ilustrativa

Articulando apoio de pés e panturrilha

Para prosseguir, retire a almofada puxando-a para cima (apenas para produtos que possuem almofadas), em seguida posicione-se ao lado de sua cadeira de rodas e com as mãos puxe o assento para cima segurando no meio do tecido, até que a cadeira se feche por completo. Observe nas imagens abaixo.



Imagem Ilustrativa

Retirando almofada

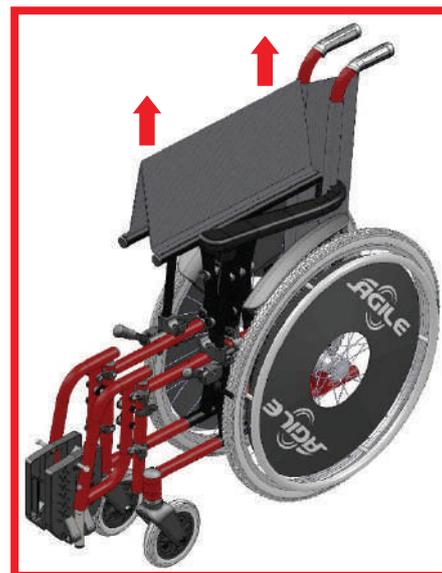


Imagem Ilustrativa

Fechando a cadeira



ATENÇÃO

Quando for fechar ou abrir sua cadeira, tome cuidado com os dedos nos tubos e nas articulações de sua cadeira. Não feche a cadeira de rodas segurando nos tubos das laterais ou do assento.

DESMONTANDO A CADEIRA DE RODAS

Para desmontar sua cadeira de rodas, inicie pelas saídas laterais removíveis e/ou eleváveis. Note que na estrutura de sua cadeira de rodas, há um dispositivo denominado “borboleta” de acionamento. Gire a “borboleta” com uma das mãos desacionando o pino trava, então gire a saída lateral removível (ou elevável) para o lado de fora da estrutura e levante levemente até que os pinos guias estejam totalmente livres, soltando a saída lateral removível (ou elevável) da estrutura de sua cadeira de rodas. Em seguida retorne a borboleta de acionamento para posição inicial.

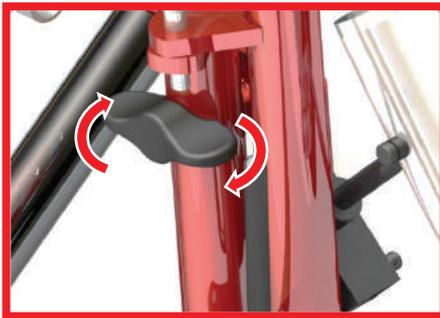


Imagem Ilustrativa

Girando a “borboleta”



Imagem Ilustrativa

Removendo os SLs

As rodas traseiras e as dianteiras, podem ser desmontadas facilmente por terem o sistema quick release. Assim como na montagem, acione o eixo quick do garfo e da roda traseira para desmontá-los.

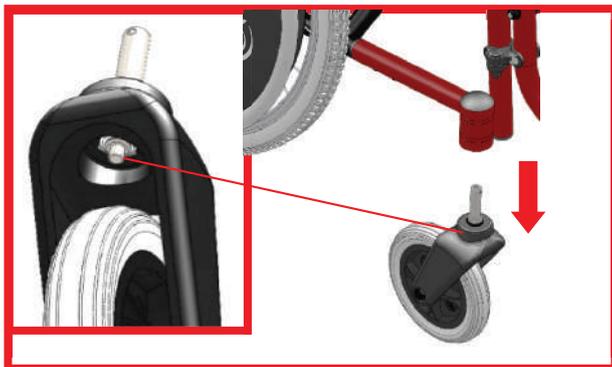


Imagem Ilustrativa

Removendo o garfo

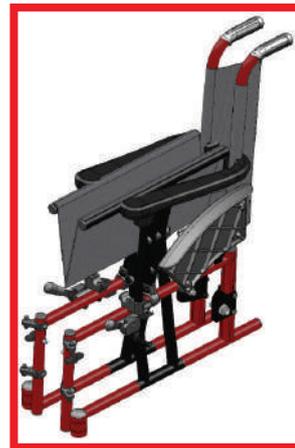


Imagem Ilustrativa

Cadeira de rodas desmontada

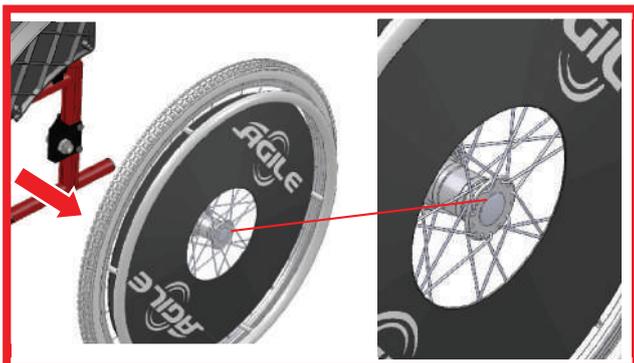


Imagem Ilustrativa

Removendo as rodas traseiras

Agora a cadeira está pronta para ser transportada no porta malas do carro ou guardada em local adequado.

Não coloque a cadeira sobre nenhum objeto/obstáculo e não coloque nada sobre a cadeira durante o transporte ou armazenamento, pois a mesma pode ser danificada e ter seu funcionamento prejudicado.

REGULANDO AS PLACAS TRASEIRAS

Para regular a placa da roda traseira, retire os parafusos fixadores, mova a placa até a posição desejada, em seguida recoloque os parafusos e aperte-os novamente.

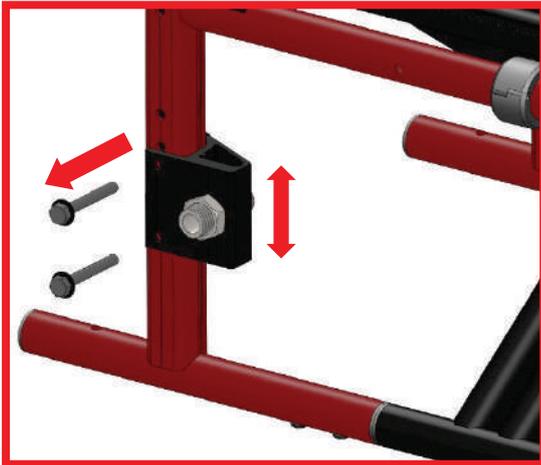


Imagem Ilustrativa

Regulando a placa

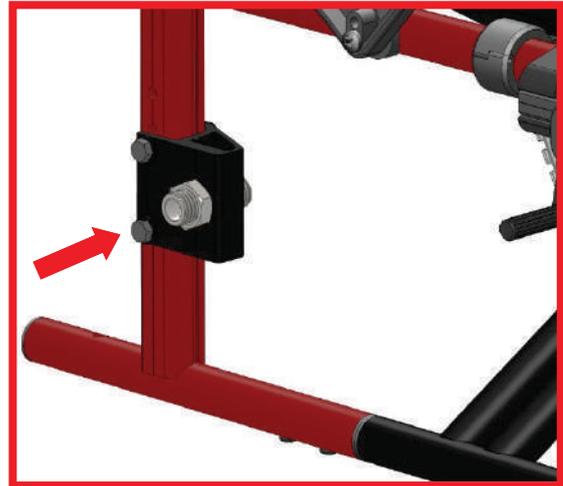


Imagem Ilustrativa

Regulando a placa

Para regular a placa da roda traseira, retire os parafusos fixadores, mova a placa até a posição desejada, em seguida recoloque os parafusos e aperte-os novamente.

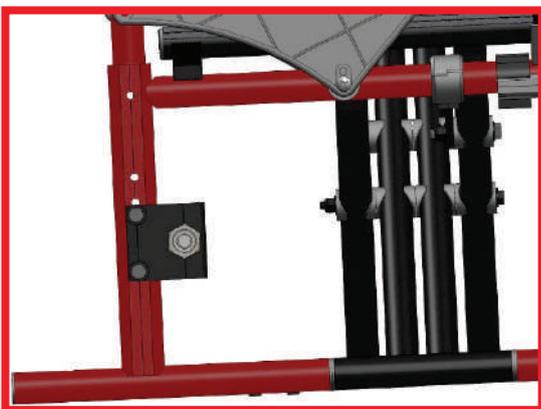


Imagem Ilustrativa

Invertendo a placa

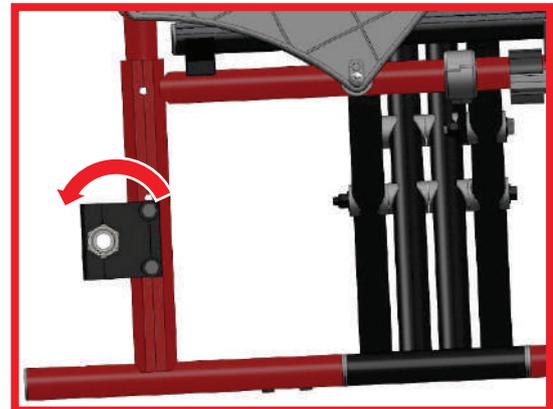


Imagem Ilustrativa

Invertendo a placa

A face plana da placa sempre deve ficar voltada para o lado de fora da cadeira, caso fique invertida não será possível a montagem da roda traseira.

SUORTE DE SORO⁸

As cadeiras que possuem suporte de soro, permitem a remoção e regulação de altura da haste de soro.

Para regular ou remover a haste de soro, gire o manipulador da haste no sentido anti-horário até que a haste seja totalmente liberada. Regule a altura desejável e aperte o manipulador no sentido-horário para fixar a haste de soro na posição desejada. Observe as imagens abaixo.

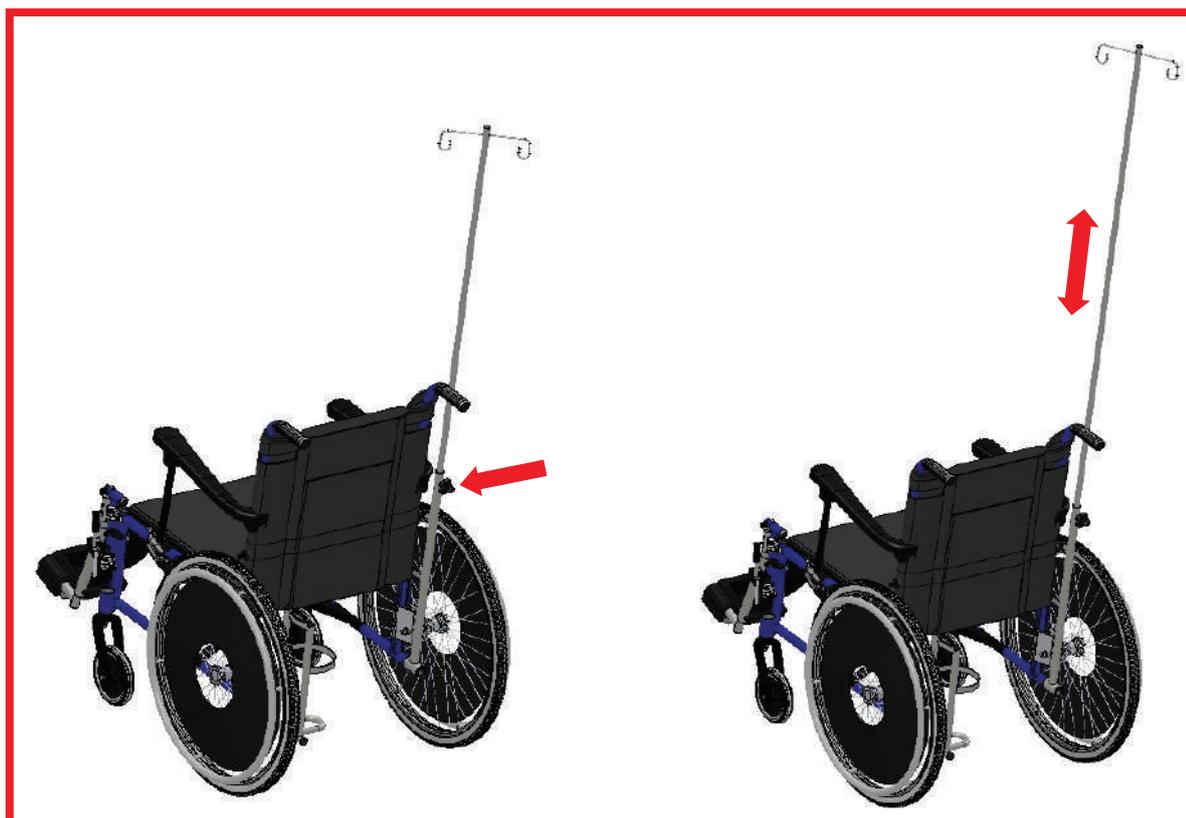


Imagem Ilustrativa

Regulando a haste de soro

TABELA DE CARACTERÍSTICAS

	AGILE	AGILE FAT	AGILE HOSPITALAR	AGILE INFANTIL
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Estrutura	Dobrável em duplo X tubular	Dobrável em duplo X tubular	Dobrável em duplo X tubular	Dobrável em X tubular
Acabamento	Pintura eletrostática resina epóxi			
Encosto	Fixo	Fixo	Fixo	Fixo
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Flexível	Flexível	Flexível	Flexível
	Nylon	Nylon	Courvin	Nylon
Empunhadreira	Fixa	Fixa	Fixa	Fixa
Apoio de cabeça	-	-	-	-
Assento	Nylon	Nylon	Courvin	Nylon
	Flexível	Flexível	Flexível	Flexível
Almofada	Espuma Injetada	Espuma Injetada	-	Espuma Injetada
Rodas traseiras	Aro 24"	Aro 24"	Aro 24"	Aro 20"
	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
	Pneu inflável	Pneu anti-furo	Pneu anti-furo	Pneu anti-furo
	Eixo quick	Eixo quick	Eixo quick	Eixo quick
	Protetor de raios	Protetor de raios	Protetor de raios	Protetor de raios
Aro de propulsão	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
	Tubo Ø20mm	Tubo Ø20mm	Tubo Ø20mm	Tubo Ø20mm
	Anodizado	Anodizado	Anodizado	Anodizado
Rodas dianteiras	Aro 6"	Aro 6"	Aro 6"	Aro 5"
	Pneu maciço	Pneu maciço	Pneu maciço	Pneu maciço
	Garfo em nylon	Alumínio	Garfo em alumínio	Garfo em nylon
	Eixo quick	Eixo quick	Eixo quick	Eixo quick
Freios	Bilateral	Bilateral	Bilateral	Bilateral
	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
	Ajuste de profundidade/ângulo	Ajuste de profundidade/ângulo	Ajuste de profundidade/ângulo	Ajuste de profundidade/ângulo
Protetor de roupa	Com abas	Com abas	Com abas	Com abas
	-	-	-	-
	Fixo na estrutura	Fixo na estrutura	Fixo na estrutura	Fixo na estrutura
Apoio de pés	Individual	Individual	Individual	Individual
	Articulado	Articulado	Articulado	Articulado
	Removível	Removível	Removível	Removível
	-	-	Elevação de pernas	-
	Calcanheira	Calcanheira	Apoio de panturrilha	Calcanheira
	Ajustável em Altura	Ajustável em Altura	Ajustável em Altura	Ajustável em Altura
Apoio de braço	Escamoteável	Escamoteável	Escamoteável	Escamoteável
Ajuste do CG	Ajustável	Ajustável	Ajustável	Ajustável
Suportes	-	-	Soro / Oxigênio	-
Anti-tombo	Opcional	Opcional	Opcional	Sim
	Com roda	Com roda	Com roda	Com roda
Tilt	Regulável	Fixo	Fixo	Regulável
Cinto	-	-	-	-
Capacidade de Carga (Kg)	120	130	120	50
Embalagem	Caixa de papelão	Caixa de papelão	Caixa de papelão	Embalagem plástica

TABELA DE CARACTERÍSTICAS

	AGILE RECLINAVEL	FIT	FIT RECLINAVEL
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Estrutura	Dobrável em duplo X tubular	Dobrável X tubular	Dobrável X tubular
Acabamento	Pintura eletrostática resina epóxi	Pintura eletrostática resina epóxi	Pintura eletrostática resina epóxi
Encosto	Reclinável Mola a gás	Fixo -	Reclinável Pistão Mecânico
	Esticador removível	-	Esticador removível
	Flexível Nylon	Flexível Nylon	Flexível Nylon
Empunhadreira	Fixa	Fixa	Fixa
Apoio de cabeça	Sim	-	Sim
Assento	Nylon	Nylon	Nylon
	Flexível	Flexível	Flexível
Almofada	Espuma Injetada Aro 24"	Espuma Injetada Aro 24"	Espuma Injetada Aro 24"
	Alumínio	Alumínio	Alumínio
	Pneu inflável Eixo quick	Pneu anti-furo Eixo quick	Pneu anti-furo Eixo quick
	Protetor de raios	-	-
Aro de propulsão	Alumínio Tubo Ø20mm	Alumínio Tubo Ø20mm	Alumínio Tubo Ø20mm
	Anodizado	Anodizado	Anodizado
Rodas dianteiras	Aro 6" Pneu maciço	Aro 6" Pneu maciço	Aro 6" Pneu maciço
	Garfo em nylon	Garfo em nylon	Garfo em nylon
	Eixo quick Bilateral	Eixo Fixo Bilateral	Eixo quick Bilateral
Freios	Alumínio	Alumínio	Alumínio
	Ajuste de profundidade/ângulo	Ajuste de profundidade/ângulo	Ajuste de profundidade/ângulo
Protetor de roupa	Plano	Com abas	Plano
	- Fixo no apoio de braço	- Fixo na estrutura	- Fixo no apoio de braço
Apoio de pés	Individual	Individual	Individual
	Articulado Removível	Articulado Removível	Articulado Removível
	Elevação de pernas	-	Elevação de pernas
	Apoio de panturrilha Ajustável em Altura	Calcanheira Ajustável em Altura	Apoio de panturrilha Ajustável em Altura
Apoio de braço	Removível	Escamoteável	Removível
Ajuste do CG	Ajustável	Ajustável	Ajustável
Suportes	-	-	-
Anti-tombo	Sim	Opcional	Sim
	Com roda	Com roda	Com roda
Tilt	Regulável	Fixo	Fixo
Cinto	-	-	-
Capacidade de Carga (Kg)	120	100	100
Embalagem	Caixa de papelão	Caixa de papelão	Caixa de papelão



FERRAMENTAS

As ferramentas necessárias para os ajustes e regulagens contidos deste manual são:

- Duas chaves de Boca fixa 7/16" (regulagem da placa traseira e apoio para pés);
- Uma chave Allen 3/16" (regulagem do apoio para pés);
- Uma chave Allen 5mm (regulagem dos freios).



ATENÇÃO


As ferramentas necessárias para os ajustes e regulagens NÃO estão inclusos com o produto.

ACESSIBILIDADE NA **PALMA DA MÃO**


Conheça o **Guiaderodas**

BAIXE O APP GUIADERODAS

Locais com acessibilidade: avalie os lugares que você frequenta e ajude milhões de pessoas com dificuldade de locomoção a sair de casa.

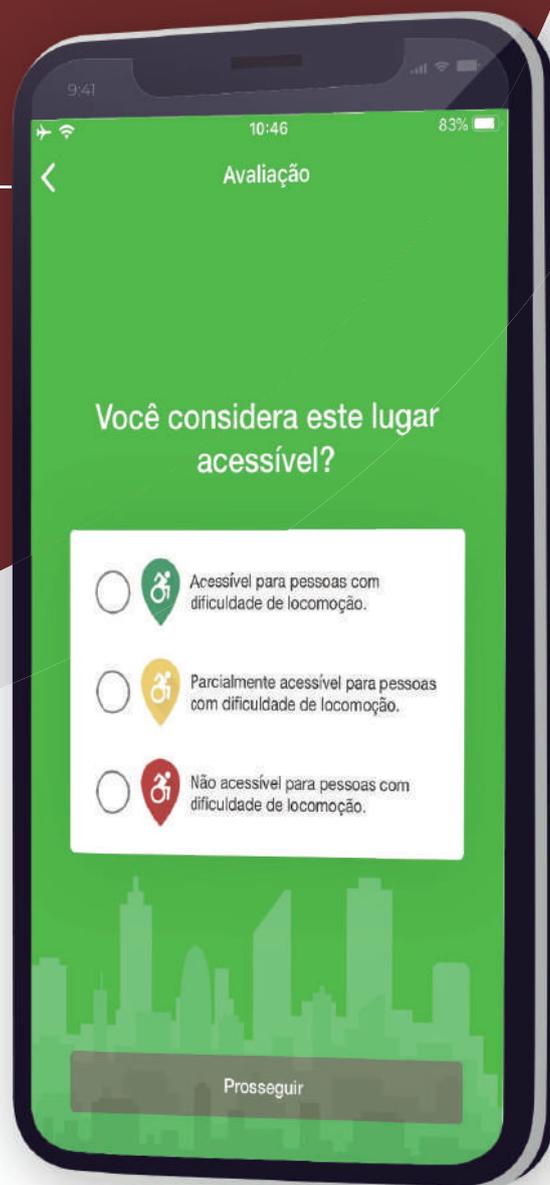

BUSQUE E AVALIE LOCAIS COM ACESSIBILIDADE

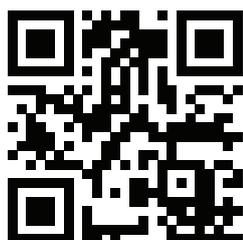

A Ortopedia Jaguaribe recomenda a utilização do aplicativo @guiaderodas. Compartilhe suas ideias e contribua com um mundo melhor.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Cliente: _____

Revendedor: _____ Data da Saída: _____

A PARTE ESTRUTURAL DO EQUIPAMENTO (LATERAIS E CENTRO) TEM GARANTIA 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE COMPRA – DEMAIS PARTES GARANTIA DE 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A VIDA ÚTIL DO PRODUTO É DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO (em termos legais, para reposição de peças após alterações no produto e/ou o produto parar de ser fabricado).

1- TERMOS DE GARANTIA

A garantia cobre eventuais defeitos de material empregado e/ou eventuais defeitos de funcionamento mecânico. Estão excluídos da garantia:

Desgaste natural pelo uso (tecidos, peças móveis, pneus, etc.);

Danos causados pela falta de manutenção, limpeza e lubrificação;

Avarias resultantes da imperícia do usuário e uso indevido (circular em locais impróprios, fazer manobras inapropriadas, etc.).

2- EXTINÇÃO DA GARANTIA

A garantia será extinta imediatamente pelo término do prazo de validade.

Pela introdução de modificações, adaptações, alterações, remoções e uso de acessórios impróprios (não originais, ou de outros produtos).

Pela assistência prestada por pessoas não autorizadas.

Pela inobservância das prescrições constantes do manual de instruções.

3- GENERALIDADES

O fabricante não se responsabiliza por prejuízos causados em decorrência de acidente.

As peças substituídas sem débito; em decorrência da garantia, são de propriedade do fabricante.

Fica a critério do fabricante a escolha do local para a execução do trabalho.

4- CUIDADOS ESPECIAIS

A cadeira de rodas, assim como qualquer outro equipamento de uso pessoal, tem uma vida útil que depende muito da utilização e do cuidado com que é manuseado, o importante é saber utilizá-la da melhor forma possível, respeitando seus limites e fazendo sempre uma manutenção preventiva e eficiente.

ATENÇÃO

Sempre que for deixar a cadeira de rodas estacionada com o usuário sobre a mesma utilize o freio e nunca fique parado em rampas (subindo ou descendo), no meio de vias ou locais perigosos.

Lubrifique periodicamente: eixos e rolamentos (rodas e garfos) procedimento no site.

Manter os pneus sempre calibrados (conforme indicado na lateral do pneu).

Verifique periodicamente o aperto das porcas, parafusos (caso necessário reaperte) procedimento site.

Troque os revestimentos do assento e encosto assim que apresentarem rasgos ou deterioração pela ação do tempo.

Peças e acessórios para substituição podem ser adquiridos no distribuidor mais próximo. Consulte nosso serviço de atendimento indicado no verso do manual.

SOMENTE UTILIZE PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA

Revendedor Autorizado



Serviço de Atendimento ao Cliente

 (11) 99168-5881

atendimento@ortopediajaguaribe.com.br

www.ortopediajaguaribe.com.br

Guarde este manual para futuras consultas
Qualquer dúvida entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.
Não jogue este impresso no chão ou em vias públicas