

ESTADIÔMETRO ULTRASSÔNICO



O produto usa tecnologia ultrassônica para medição de altura


● Índice Técnico

1. Faixa de medição: 30 - 200 cm
2. Erro de medição: +/- 1 cm
3. Graduação: 0,1 cm
4. Tela LCD
5. Lembrete de campainha
6. Controle de botão único

● Funções do botão

1. Medição: Pressione o botão ligeiramente para medir;
2. Acionar: toque no botão liga / desliga para acionar quando estiver desligado;
Será desligado automaticamente sem qualquer operação;
3. Conversão de unidades de medida: Com o aparelho desligado, pressione o botão por cerca de 3 segundos e solte quando o valor com a unidade de medida aparecer na tela. Para alterar a unidade de medida, mantenha pressionado o botão até alterar. Para sair, acione o botão novamente ou aguarde por aproximadamente 6 segundos sem operações.

● Tela de LCD

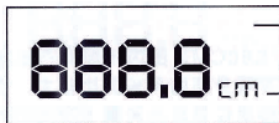

Exibição de altura

Unidade de medida

● Medição de Altura

Escolha uma parede sem barreiras e sem inclinação na faixa de aproximadamente 80 cm;

Método de medição 1:

1. Coloque a criança ou adulto de pé contra a parede e fixe o Estadiômetro paralelo ao topo da cabeça da criança ou adulto;
2. Retire a criança ou adulto, porém o Estadiômetro deve permanecer ainda fixado no lugar original, pressione o botão. Quando ouvir o sinal sonoro, pode retirá-lo para analisar os dados.



Método de medição 2:


1. Segure o Estadiômetro com uma mão e certifique-se de que a parte inferior do aparelho esteja na parede, conforme mostrado na figura 1;
2. A criança ou adulto fica em pé bem próximo à parede, ajuste a altura do Estadiômetro de maneira adequada, mantenha-o paralelo no topo da cabeça, conforme mostrado na figura 2;
3. Fixe o Estadiômetro e a criança ou adulto se afasta da parede. Pressione o botão, retire e analise os dados após ouvir o sinal sonoro conforme mostrado na figura 3.



Nota: Durante o processo de medição, nenhum obstáculo saliente, incluindo a linha de ancoragem, é permitido dentro do intervalo de 80 cm da parede onde o aparelho está localizado, caso contrário, ele irá interferir na medição. Se você achar que a diferença de altura é relativamente grande, verifique se há uma linha do pé saliente e, em seguida, mova para a posição da linha sem pé e meça novamente. Se a posição da linha não inclinada não for encontrada, o resultado do teste mais a altura da linha do pé é igual à altura real.

● Baixo Consumo de Energia

O display mostra LO indica que a bateria está fraca, carregue-a utilizando seu cabo USB que acompanha o equipamento. Após carregado, a bateria possui duração de aproximadamente de 2 meses quando utilizado de 2 a 3 vezes ao dia.

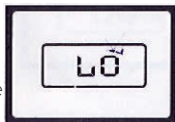

● Modo de espera / Desligado

Quando não houver operação por cerca de 6 segundos, o display será desligado e permanecerá em espera. Basta pressionar o botão e ele será reativado.

● CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Após o uso mantenha o aparelho sempre sem sua embalagem original.

Armazene o aparelho em local arejado, temperatura ambiente, distante do calor, contato direto com a luz solar ou qualquer umidade.

Manuseie com cuidado, evite quedas, batidas e mantenha longe do alcance de crianças.

Quando necessário, limpe o aparelho com pano levemente umedecido com água.

Composição: Material Plástico ABS

O Estadiômetro possui garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. A garantia é válida, a partir da data de emissão da nota fiscal de aquisição do produto. É de responsabilidade da CBEMED reparar ou repor o produto após a análise do problema apresentado e quando confirmado se tratar de um defeito de fabricação. É de responsabilidade do comprador, reter e manter a guarda da nota fiscal ou cupom fiscal da compra e quando solicitado pela CBEMED remeter o produto ao endereço informado por esta, de maneira segura, para que o mesmo não sofra danos neste trajeto. EXCLUSÃO DA GARANTIA: Esta garantia exclui e não cobre problemas decorrentes de uso inadequado, acidentes, violações de lacre ou adaptações/alterações, como também falta da nota ou cupom fiscal.

● Importado por:

CBEMED – Indústria e Comercio de Equipamentos Médicos LTDA.
R. Américo Simões, 225, São Roque da Chave, Itupeva – SP, CEP
13.295-000
faleconosco@cbemed.com.br, 11 4496-7950 - www.cbemed.com.br

● Fabricante:

Zhejiang Tiansheng Electronics Co., Ltd.
3/F, Building 2, No. 19, Mingyuan North Avenue, Economic
Development Zone, Yongkong, Zhejiang, China

