

Cadeira de Banho

MODELO D50



MANUAL DO USUÁRIO

1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir sua Cadeira de Banho D50.

Este Manual de Instruções contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro da sua cadeira de banho.

CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

DELLAMED S.A.

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço:

Rua Henrique Rech, 312 - Bairro Sanvitto II, Cinquentenário

CEP 95012-613 - Caxias do Sul/RS - Brasil

Atendimento ao Consumidor:

0800.604.8008

(54) 3066.3734

(54) 99266.9008 - Whatsapp

E-mail: assistenciatecnica@dellamed.com.br

Fabricado por: Foshan Zubon Technology Co., Ltd.

Endereço Fabricante: N.º 1, Floor Two, Building N.º5, Yungang Industry Park, Shilian Shidong, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, China.

Registro da Anvisa: 80795950026

2. CONHECENDO O PRODUTO

A imagem abaixo apresenta a sua Cadeira de Rodas D50 e seus principais componentes com suas respectivas terminologias:



*Imagem ilustrativa. Pode haver mais de um tipo de coloração em componentes deste produto.

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Encosto | 1 | Rodízio | 4 |
| Estrutura do Assento | 1 | Assento | 1 |
| Estrutura do Encosto | 1 | Descanso p/ pés | 1 |
| Estrutura Principal | 1 | Comadre | 1 |

3. TABELA DE INFORMAÇÕES

| | |
|--------------------|--------|
| Peso do Produto: | 9,6kg |
| Largura Total: | 560mm |
| Altura Total: | 1110mm |
| Comprimento Total: | 840mm |
| Suporta: | 150kg |

4. MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

PASSO 1 - MONTAGEM DA ESTRUTURA PRINCIPAL

· Retire o produto da embalagem com cuidado, remova o filme plástico, abra a estrutura principal da cadeira de forma que o encaixe fique voltados para dentro.



PASSO 2 - MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ASSENTO E BARRA FRONTAL

· Encaixe a estrutura do assento no suporte traseiro da cadeira e logo após encaixe a barra da estrutura frontal do assento, pressionando o botão flexível para dentro.



PASSO 3 - MONTAGEM DAS RODAS

· Posicione as estruturas da cadeira de pernas voltadas para cima, trave o freio das rodas frontais para facilitar a montagem, encaixe as rodas com a perfuração, coloque o parafuso e a porca e instale seus rodízios com firmeza.



PASSO 4 - MONTAGEM DO DESCANSO PARA OS PÉS

• Instale o descanso dos pés, posicionando nos encaixes plásticos e coloque os parafusos com a área da rosca para dentro.

Obs.: Os parafusos não necessitam de muito aperto, para facilitar a movimentação do descanso.



PASSO 5 - MONTAGEM DO ENCOSTO

• Para instalar o encosto, primeiro remova os pinos de fixação formato “E” que acompanham a estrutura.

• Encaixe o encosto na cadeira.

• Alinhe os furos do encosto e da estrutura.

• Coloque o pino de fixação formato “E”.



PASSO 6 - MONTAGEM DA COMADRE E ASSENTO

• Encaixe a comadre no centro da estrutura do assento.

• Encaixe o assento.

• Após a montagem do assento, faça uma revisão completa.



5. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Freios: Para travar a cadeira, basta empurrar as travas dos freios.
- Segurança: Ao sentar ou levantar da cadeira, mantenha os freios acionados.
- Manutenção:
 1. Mantenha eixos, rolamentos das rodas e articulações lubrificados.
 2. A secagem da sua cadeira D50 é muito importante.
 3. Evite deixar a cadeira exposta aos raios solares por longos períodos, isso evitará ressecamento e possíveis rachaduras de peças plásticas.

CUIDADO!

Durante o banho, com o uso de shampoo e sabonetes, o assento pode se tornar escorregadio!

Não use o apoio de pés para subir ou descer da cadeira.

O mesmo deve ser utilizado apenas para o descanso dos pés enquanto o paciente estiver sentado.

CUIDADOS COM A SECAGEM DA SUA CADEIRA DE BANHO



As cadeiras de aço carbono Dellamed D50 são robustas e resistentes à umidade, porém como todas as cadeiras em aço carbono estão sujeitas à corrosão. Alguns cuidados adicionais pós-uso são necessários para que a água não permaneça acumulada na parte interna da cadeira, é importante que seja feita a retirada do encosto das duas laterais, virando a mesma de cabeça para baixo para que a água escorra para fora.

Adicionalmente, recomenda-se deixar a cadeira em local arejado ou ao sol até secar. É importante a retirada da cadeira da área de banho para que a mesma não se mantenha sempre em local úmido.

Com estes cuidados sua cadeira terá vida mais longa.

6. CONDIÇÕES DE GARANTIA

1 – CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

- a) O produto acima identificado possui garantia legal de 03 (três) meses para todos os seus componentes. Encerrado este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual adicional de:
- 3 (três) meses para estrutura - totalizando 6 (seis) meses de garantia;
- b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.
- c) Esta garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.
- d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.
- e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

2 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

- a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade pela Assistência Técnica da Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela mesma.
- b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada são de responsabilidade do consumidor.
- c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas pela Dellamed se encontra disponível no website oficial: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>, no caso de inexistência de Assistência Técnica credenciada no domicílio do consumidor, aplica-se o contido no item “b” acima informado.

3 – EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

- a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada pela Dellamed;
- b) Alteração e/ou remoção do número de série/lote ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;
- c) O desgaste natural do produto;
- d) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;
- e) Ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;
- f) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;
- g) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;
- h) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;
- i) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;
- j) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inadequado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;
- k) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;
- l) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;
- m) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inadequado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;
- n) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;
- o) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;
- p) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.

DellaMED

WWW.DELLAMED.COM.BR



Versão 01 – Data 13/09/2021