

Cadeira de Banho

MODELO D60



MANUAL DO USUÁRIO

1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir sua Cadeira de Banho D60.

Este Manual de Instruções contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro da sua cadeira de banho.

CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

DELLAMED S.A.

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço:

Rua Henrique Rech, 312 - Bairro Sanvitto II, Cinquentenário

CEP 95012-613 - Caxias do Sul/RS - Brasil

Atendimento ao Consumidor:

0800.604.8008

(54) 3066.3734

(54) 99266.9008 - Whatsapp

E-mail: assistenciatecnica@dellamed.com.br

Fabricado por: Guangdong Vhealth Medical Technology Company Limited

Endereço: N.º. 1-2, Tongxingang, Shangyuanfang, Liangdeng Village,

Danzao Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China.

Registro da Anvisa: 80795950029

2. CONHECENDO O PRODUTO

A imagem abaixo apresenta a sua Cadeira de Rodas D60 e seus principais componentes com suas respectivas terminologias:



Encosto	1	Rodízio	4
Estrutura do Assento	1	Assento	1
Estrutura do Encosto	1	Descanso p/ pés	1
Estrutura Principal	1	Comadre	1

3. TABELA DE INFORMAÇÕES

Peso do Produto:	7,4kg
Largura Total:	610mm
Altura Total:	965mm
Comprimento Total:	830mm
Suporta:	150kg

4. MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

PASSO 1 - MONTAGEM DA ESTRUTURA PRINCIPAL

- Retire o produto da embalagem com cuidado, remova o filme plástico, posicione as duas laterais com as porcas para o lado interno.



PASSO 2 - MONTAGEM DA ESTRUTURA TRANSVERSAL

- Encaixe a estrutura transversal voltada para cima e fixe as placas retentoras com os parafusos curtos.



PASSO 3 - MONTAGEM DAS RODAS

- Posicione as estruturas da cadeira de pernas voltadas para cima, trave o freio das rodas para facilitar a montagem, encaixe as rodas com a perfuração, coloque o parafuso e a porca e instale seus rodízios com firmeza.



PASSO 4 - MONTAGEM DO DESCANSO PARA OS PÉS


- Instale o descanso dos pés, posicionando nos encaixes plásticos e coloque os parafusos com a área da rosca para dentro.

Obs.: Os parafusos não necessitam de muito aperto, para facilitar a movimentação do descanso.



PASSO 5 - MONTAGEM DO ENCOSTO

- Posicione o encosto e fixe no encaixe plástico, cuidando para que os furos fiquem alinhados.

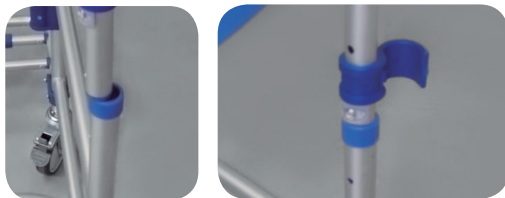

PASSO 6 - MONTAGEM DOS APOIOS DE BRAÇOS

Posicione o apoio de braço encaixando primeiramente a parte de trás no suporte plástico, fixe o parafuso longo colocando a arruela curva com a bucha plástica em seguida encaixe a parte da frente precisando para baixo.

Obs.: O sentido do parafuso deve ser de dentro para fora.



PASSO 7 - MONTAGEM DA COMADRE

- Encaixe a comadre no centro da estrutura do assento.



PASSO 8 - MONTAGEM DO ASSENTO

- Encaixe o assento. Após a montagem do assento, faça uma revisão completa e sua cadeira estará pronta para uso.



5. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Freios: Para travar a cadeira, basta empurrar as travas dos freios.
- Segurança: Ao sentar ou levantar da cadeira, mantenha os freios acionados.
- Manutenção:
 1. Mantenha eixos, rolamentos das rodas e articulações lubrificados.
 2. A secagem da sua cadeira D60 é muito importante.
 3. Evite deixar a cadeira exposta aos raios solares por longos períodos, isso evitará ressecamento e possíveis rachaduras de peças plásticas.

CUIDADO!

Durante o banho, com o uso de shampoo e sabonetes, o assento pode se tornar escorregadio!

Não use o apoio de pés para subir ou descer da cadeira.

O mesmo deve ser utilizado apenas para o descanso dos pés enquanto o paciente estiver sentado.

CUIDADOS COM A SECAGEM DA SUA CADEIRA DE BANHO



*Imagem ilustrativa.

As cadeiras de alumínio Dellamed D60 são robustas e resistentes à umidade, porém como todas as cadeiras em alumínio estão sujeitas à corrosão. Alguns cuidados adicionais pós-uso são necessários para que a água não permaneça acumulada na parte interna da cadeira, é importante que seja feita a retirada do encosto das duas laterais, virando a mesma de cabeça para baixo para que a água escorra para fora.

Adicionalmente, recomenda-se deixar a cadeira em local arejado ou ao sol até secar. É importante a retirada da cadeira da área de banho para que a mesma não se mantenha sempre em local úmido.

Com estes cuidados sua cadeira terá vida mais longa.

6. CONDIÇÕES DE GARANTIA

1 – CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

a) O produto acima identificado possui garantia legal de 03 (três) meses para todos os seus componentes. Encerrado este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual adicional de:

- 09 (nove) meses para estrutura - totalizando 01 (um) ano de garantia;
- 03 (três) meses para demais componentes - totalizando 06 (seis) meses de garantia;

b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.

c) Está garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.

d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.

e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

2 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade pela Assistência Técnica da Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela mesma.

b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada são de responsabilidade do consumidor.

c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas pela Dellamed se encontra disponível no website oficial: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>, no caso de inexistência de Assistência Técnica credenciada no domicílio do consumidor, aplica-se o contido no item “b” acima informado.

3 – EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada pela Dellamed;

b) Alteração e/ou remoção do número de série/lote ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;

c) O desgaste natural do produto;

d) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;

e) Ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;

f) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;

g) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;

h) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;

i) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;

j) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inapropriado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;

k) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;

l) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;

m) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inapropriado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;

n) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;

o) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;

p) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.

DellaMED

WWW.DELLAMED.COM.BR



Versão 02 – Data 09/11/2021