



Cadeira de Banho

MODELO D30

Versão 01 – Data 08/02/2022



Cadeira de Banho D30
Validade: Indeterminada
Registro Anvisa: 80795950033

Fabricado por: Zhongshan Jianweilong Medical Equipment CO.,LTD
Endereço: Room 1, Floor 4, Building A, No.67, Zhaoyi Road, Tongsheng Industrial Zone, Yilong Village, Dongsheng, Zhongshan, Guangdong, China.

Importado e Distribuído no Brasil por: Dellamed S.A
Rua Henrique Rech, 312 - 95012-613 - Caxias do Sul - Brasil
Responsável Técnico: Ana Flávia Suda Moreira CRF/RS 583675
Assistência Técnica: 0800 604 8008



1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir sua Cadeira de Banho Dellamed Modelo D30.

Indicado para possibilitar comodidade e segurança para as pessoas com limitações de movimento e equilíbrio durante o banho.

2. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA USO

Recomendamos que verifique se a cadeira para higienização está firmemente armada antes do uso, se os rodízios estão bem posicionados e girando livremente em todo o processo de uso. Para travar a cadeira, basta empurrar as travas dos freios.

Importante: Ao sentar ou levantar da cadeira, mantenha os freios acionados.

Cuidados: Durante o banho, com o uso de shampoo e sabonetes, o assento pode se tornar escorregadio!

Nunca utilize a cadeira sem que o apoio de pés esteja devidamente montado.

Manutenção:

1. Mantenha eixos, rolamentos das rodas e articulações lubrificadas;
2. A secagem da sua cadeira D30 é muito importante.
3. Evite deixar a cadeira exposta aos raios solares por longos períodos, isso evitará ressecamento e possíveis rachaduras de peças plásticas.

3. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Transporte: Pode ser conduzida por qualquer meio de transporte e não deve ser misturado com substâncias tóxicas.
Armazenamento: Deve ser armazenado em local com umidade relativa inferior à 80%, sem substâncias corrosivas e com boa ventilação.

4. TABELA DE INFORMAÇÕES

Peso do Produto:	6,6kg
Largura Total:	493mm
Altura Total:	860mm
Comprimento Total:	589mm
Suporta:	100kg

5. CONHECENDO O PRODUTO



Armação	1	Rodízio com Freio	2
Assento	1	Rodízio sem Freio	2
Armação do Encosto	1	Encosto	1
Manipulo	2	Apoio para Pés	1
Parafuso	2	Manual do Usuário	1

Estrutura desenvolvida em aço carbono com pintura epóxi. Assento e apoio para os braços em plástico.

6. MONTAGEM E FUNCIONAMENTO



Passo 1 - Abrir a estrutura conforme indicação da imagem.



Passo 2 - Instalar o apoio para pés conforme indicação da imagem, em seguida proceder com a montagem dos rodízios.

Desembalar os rodízios, encaixar a bucha na estrutura alinhando a sua furação. Rodízios com freios devem ser montados na parte frontal.



Passo 3 - Instale o encosto na estrutura da cadeira e encaixe com o parafuso e o manipulo, conforme indicação da imagem.



Passo 4 - Instalar a estrutura do assento, encaixando conforme imagem á baixo.

7. TABELA DE MEDIDAS

		mm
A	Altura do solo até a parte superior do apoio de braços.	680
B	Largura interna (entre as estruturas internas dos tubos).	390
C	Distância da parte superior do tubo da estrutura lateral até a parte superior do apoio dos braços.	208
D	Distância da parte externa do tubo da estrutura até a parte externa do apoio de pés.	176
D1	Diâmetro do tubo do encosto.	22
D2	Diâmetro do tubo da estrutura de encaixe do encosto.	25
D3	Diâmetro do tubo da estrutura de encaixe da cadeira.	22
D4	Diâmetro do tubo interno do apoio de pés.	19
A	Altura do solo até a parte inferior da estrutura do assento.	430
B	Altura do solo até a parte superior do tubo do encosto.	860
C	Altura do solo até a parte inferior da estrutura do apoio de pés.	130
D	Largura interna (entre os tubos).	440

(As medidas do produto podem variar em +/- 0,5kg e +/- 10mm)

8. CUIDADOS COM A SECAGEM DA SUA CADEIRA DE BANHO

As cadeiras de aço carbono Dellamed D30 são robustas e resistentes à umidade, porém como todas as cadeiras em aço carbono estão sujeitas à corrosão. Alguns cuidados adicionais pós-uso são necessários para que a água não permaneça acumulada na parte interna da cadeira, é importante que seja feita a retirada do encosto das duas laterais, virando a mesma de cabeça para baixo para que a água escorra para fora.

Adicionalmente, recomenda-se deixar a cadeira em local arejado ou ao sol até secar. É importante a retirada da cadeira da área de banho para que a mesma não se mantenha sempre em local úmido.

Com estes cuidados sua cadeira terá vida mais longa.

9. TERMO DE GARANTIA

- 1- CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA
a) O produto acima identificado possui garantia legal de 03 (três) meses para todos os seus componentes. Encerrado este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual adicional de:
- 3 (três) meses para estrutura - totalizando 6 (seis) meses de garantia;
b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.
c) Esta garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.
d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.
e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.
2 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA
a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade pela Assistência Técnica da Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela mesma.
b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada são de responsabilidade do consumidor.
c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas pela Dellamed se encontra disponível no website oficial: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>, no caso de inexistência de Assistência Técnica credenciada no domicílio do consumidor, aplica-se o contido no item "b" acima informado.
3 - EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA
Situações e itens que não são cobertos pela garantia:
a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada pela Dellamed;
b) Alteração e/ou remoção do número de série/ lote ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;
c) O desgaste natural do produto;
d) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;
e) Ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;
f) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;
g) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;
h) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;
i) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;
j) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inadequado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;
k) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;
l) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;
m) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inadequado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;
n) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;
o) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;
p) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.