

Cadeira de Transporte / silla de transporte

MODELO D90

Português e Espanhol



dellamed
Home

1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir sua Cadeira de Transporte D90.

Este Manual contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro do seu produto.

CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

Detentor do Registro e Fabricante Legal **DELLAMED S.A.**

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço Matriz: Rua Henrique Rech, 312 - 95012-613 Caxias do Sul - RS

Endereço Centro de Distribuição: Rod Antonio Heil, 6250 - 88318-112 Itajaí – SC

Registro Anvisa: 80795950042



QUEREMOS OUVIR VOCÊ!

Atendimento ao Consumidor Brasileiro:

0800.604.8008

assistenciatecnica@dellamed.com.br



2. CONHECENDO O PRODUTO

A cadeira tem como finalidade transportar pessoas com difícil locomoção em espaços pequenos e com movimentação limitada, dispensando assim o uso de equipamentos maiores para transporte destes pacientes.




1 Sistema de Freios	5 Roda Traseira
2 Trava de Segurança da Estrutura	6 Manopla
3 Manopla dos Freios	7 Encosto para as Costas
4 Garfos com Rodas	8 Descanso para os Pés

3. DADOS TÉCNICOS

Dimensão do produto (CxLxA)	70 x 52 x 91,2 cm
Peso Suportado	100 kg
Altura do assento ao piso	48,5 cm
Profundidade do assento	42,5 cm
Largura do assento	42 cm
Altura do encosto das costas	42 cm
Espaço livre do apoio para os pés ao piso	16 cm

4. INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

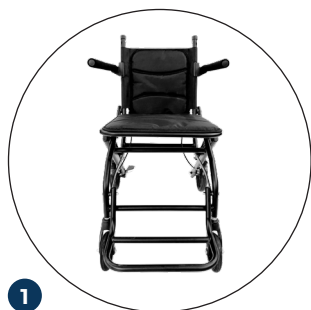

1

Retire da caixa e abra sua cadeira de transporte.



2

Encaixe a manopla no local indicado.



3

Gire o manípulo para fixar a manopla corretamente.

5. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

5.1. Armazenagem:

- Para garantir a integridade do produto, é importante mantê-lo em um local seco e arejado, protegido da exposição direta aos raios solares. Além disso, evite a presença de componentes atmosféricos, como gases corrosivos e alta umidade, pois eles podem comprometer a vida útil do produto.
- Evite deixar o produto exposto ao clima externo por longos períodos, pois isso pode causar oxidação das partes metálicas, podendo causar mau funcionamento.
- Mantenha o produto longe de altas temperaturas.

5.2. Cuidados durante o uso:

- Não exceda a capacidade máxima de peso suportado de 100kg.
- Para movimentação de pacientes, certifique-se de travar os freios simultaneamente com o equipamento parado e assim, realizar a operação.
- Deve-se realizar periodicamente a revisão do equipamento para garantir a segurança e seu correto funcionamento durante sua utilização.
- Observe que as manoplas estejam firmes e em conformidade.
- Antes de utilizar, certifique-se que os freios estão funcionando normalmente;
- Verificar se a estrutura está firme observando os parafusos e travas.
- Dobrar o apoio de pés para dentro da estrutura na hora de levantar-se para evitar o risco de cair do equipamento.
- Se você notar que há algo que pode comprometer o usuário durante o uso do equipamento, não o utilize.
- Ao sair do equipamento, utilize os apoios de braços para ficar de pé para garantir mais segurança ao usuário.
- Não apoie objetos pesados no equipamento.
- Não utilize o equipamento em escadas e lugares de alta inclinação.

Nota: Em caso de eventuais falhas no produto, procure um profissional autorizado ou contate a assistência técnica Dellamed para realizar o suporte necessário.

ATENÇÃO

Esse produto só deve ser utilizado para transporte de pessoas. Utilizá-lo para qualquer outra finalidade poderá danificar o produto, anulando a garantia.

6. CONDIÇÕES DE GARANTIA

1 – CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

O produto acima identificado possui garantia legal de 03 (três) meses para todos os seus componentes. Encerrado este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual adicional de:

- 9 (nove) meses para estrutura - totalizando 12 (doze) meses de garantia;
- b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.
- c) Está garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.
- d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.
- e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

2 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

- a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade apresentada pela Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela fabricante.
- b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada dentro do mesmo perímetro urbano do consumidor, são de responsabilidade do usuário.
- c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas à Dellamed se encontra disponível no website oficial da fabricante: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>.

3 – EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

- a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada à Dellamed;
- b) Alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;
- c) O desgaste natural do produto;
- d) Danos decorrentes de falhas ou sobrecargas no fornecimento de energia elétrica;
- e) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;
- f) Ligação do produto em rede elétrica/tensão inadequada, ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;
- g) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;
- h) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;
- i) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;
- j) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;
- k) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inapropriado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;
- l) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;
- m) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chovas e enchentes;
- n) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inapropriado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;
- o) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;
- p) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;
- q) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.

CONHEÇA OUTROS PRODUTOS DELLAMED



Cadeira de Transferência D80 - Bengala D8 - Bengala D9 4 Pontas

Silla de Transporte

MODELO D90

1. INTRODUCCIÓN

Estimado Cliente,

Gracias por comprar su silla de transporte D90.

Este manual de instrucciones contiene las recomendaciones necesarias para el uso correcto y seguro de su silla de Ruedas.

CONOZCA DELLAMED

Creada en 2010, en la ciudad de Caxias do Sul - RS, Dellamed es sinónimo de calidad e innovación. Buscando siempre el buen servicio, Dellamed tiene como lema principal tener la salud de los clientes en 1er lugar, buscando así ofrecer los mejores productos del mercado para poder atender eficientemente a todos los consumidores finales.

Fabricante **DELLAMED S.A.**

Dirección Principal: Rua Henrique Rech, 312 - 95012-613 Caxias do Sul - RS

Dirección Centro de Distribución: Rod Antonio Heil, 6250 - 88318-112 - Itajaí - SC

2. CONOCIENDO EL PRODUCTO

La silla tiene como finalidad el transporte de personas con dificultad de locomoción en espacios reducidos y con movimiento limitado, prescindiendo así del uso de equipos de mayor tamaño para el transporte de estos pacientes.



1 Sistema de frenos	5 Rueda trasera
2 Cerradura de seguridad de la estructura	6 Guantelete
3 Mango de freno	7 Respaldo
4 Horquillas con ruedas	8 Reposapiés

3. DATOS TÉCNICOS

Dimensión del producto (LxWxH)	70 x 52 x 91,2 cm
Peso soportado	100 kg
Altura del asiento al piso	48,5 cm
profundidad del asiento	42,5 cm
ancho del asiento	42 cm
Altura del respaldo	42 cm
Espacio libre desde el reposapiés hasta el suelo	16 cm

4. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



1

Sácalo de la caja y abre tu silla de transporte.



2

Montar el mango en el lugar indicado.



3

Gire el mango para fijar el mango correctamente.

5. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.1. Almacenamiento:

- Para asegurar la integridad del producto, es importante conservarlo en un lugar seco y ventilado, protegido de la exposición directa a la luz solar. Además, evite la presencia de componentes atmosféricos, como gases corrosivos y alta humedad, ya que pueden comprometer la vida útil del producto.
- Evite dejar el producto expuesto al clima exterior por períodos prolongados, ya que esto puede provocar la oxidación de las partes metálicas, lo que puede causar mal funcionamiento.
- Mantener el producto alejado de altas temperaturas.

5.2. Precauciones durante el uso:

- No exceda la capacidad de peso máxima soportada de 100 kg.
- Para el movimiento de pacientes, asegúrese de bloquear los frenos simultáneamente con el equipo parado y así realizar la operación.
- Revisar periódicamente el equipo para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento durante su uso.
- Asegúrese de que las manijas estén apretadas y conformes.
- Antes de usar, asegúrese de que los frenos funcionen normalmente;
- Verificar que la estructura esté firme, observando los tornillos y pestillos.
- Pliegue el reposapiés en la estructura cuando esté de pie para evitar el riesgo de caerse del equipo.
- Si observa que hay algo que pueda comprometer al usuario durante el uso del equipo, no lo use.
- Al dejar el equipo, utilice los reposabrazos para ponerse de pie para garantizar más seguridad al usuario.
- No coloque objetos pesados sobre el equipo.
- No utilice el equipo en escaleras y pendientes pronunciadas.

Nota: En caso de fallas en el producto, busque un profesional autorizado o comuníquese con la asistencia técnica de Dellame para brindar el soporte necesario.



ATENCIÓN

Este producto debe utilizarse únicamente para el transporte de personas. Usarlo para cualquier otro propósito podría dañar el producto, anulando la garantía.

dellamed



Versão 00 – Data 14/08/2023

