

# Multi

SAÚDE



## Foot Spa

Hidromassagador para pés  
HC006 - 127V | HC007 - 220V  
Manual de Instruções





## PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto Multi Saúde.

A Multi Saúde proporciona momentos de bem-estar e relaxamento para que você possa manter o corpo em equilíbrio através de produtos de qualidade que auxiliam no cuidado da saúde e tornam o seu dia a dia mais leve aonde quer que esteja.

## AVISOS IMPORTANTES

- Antes de usar o equipamento, leia atentamente as instruções de uso e as medidas de segurança.
- Se você der o equipamento para outras pessoas, não deixe de dar também este manual.
- Este manual foi feito para este equipamento e contém a operação e informações importantes de uso. Leia-o cuidadosamente para evitar danos ao equipamento.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA

Ao utilizar o Hidromassageador para pés alguns cuidados devem ser tomados. Leia com atenção as instruções abaixo:

- Crianças ou pessoas com limitações física e/ou mentais devem utilizar o produto com a supervisão de um adulto
- Não usar o produto em caso de rachaduras, vazamentos ou qualquer outro tipo de danificação.
- Caso o botão de funções seja molhado, pare o uso imediatamente e seque-o completamente.
- Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.
- Sempre mova o botão de funções à posição 0 e desconecte o plugue da tomada quando o produto não estiver sendo utilizado e/ou ao limpar o produto.
- Não desligue o produto enquanto seus pés estiverem na água.
- Não segure o produto pelo cabo de alimentação.
- Mantenha o cabo longe de superfícies quentes.
- Não desmonte o produto.

- Não use o produto durante o banho, em piscinas e saunas. O uso deste produto deve ser feito longe de locais com alto índice de umidade.
- Não coloque objetos dentro do produto.
- Ao utilizar o produto, não cubra o produto com cobertores ou almofadas.


## **NÃO UTILIZE ÓLEOS OU ESSÊNCIAS NO PRODUTO. ISSO PODE AGARRETAR NO MAU FUNCIONAMENTO DAS BOLHAS.**

### **ATENÇÃO**

- Sempre cheque a temperatura da água antes de utilizar o produto.
- Não fique em pé ao utilizar o produto. O mesmo deve ser utilizado enquanto você estiver sentado.
- Certifique-se de que suas mãos estão secas ao manusear o plugue e/ou o botão de funções.
- Em caso de gravidez, diabetes ou outras doenças, consulte seu médico antes de utilizar o produto.
- Não utilize o produto em caso de feridas expostas, queimaduras e inflamações na pele.

### **DETALHES DO PRODUTO**

1. Tapa protetora
2. Recipiente
3. Rolos massageadores
4. Lâmpada da luz infravermelha
5. Botão de funções

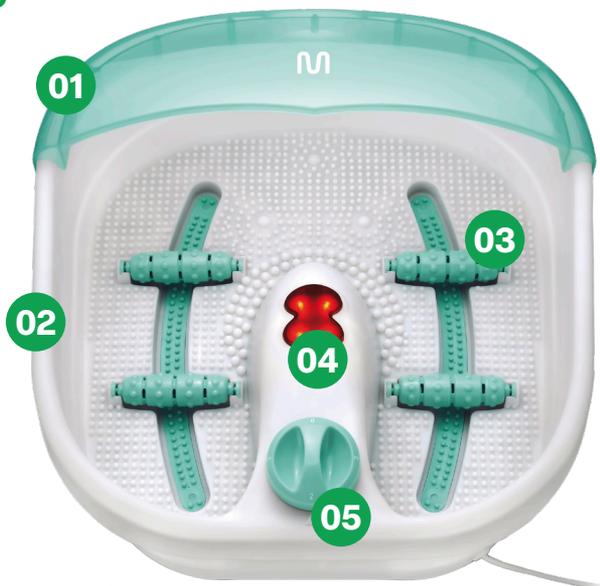

## MODO DE USAR

1. Assegure-se de que o produto não esteja ligado e/ou com o plugue conectado à tomada.
2. Encha o Hidromassageador com água morna.
3. Conecte o plugue à tomada.
4. Sente-se e coloque os pés dentro do Hidromassageador.
5. Ligue o Hidromassageador movimentando o botão de funções para uma das três posições (1, 2 e 3) e desfrute de uma massagem posicionando os pés em cima dos rolos massageadores e os movimentando para frente e para trás.

## MODO DE FUNCIONAMENTO

Posição	Modo de Funcionamento
0	Desligado
1	Bolhas
2	Aquecimento + Infravermelho
3	Bolhas + Aquecimento + Infravermelho

**ATENÇÃO:** O Hidromassageador apenas mantém o calor da água colocada. Antes de iniciar sua massagem, aqueça a água a ser utilizada.

**CUIDADO:** Certifique-se de que a temperatura da água esteja agradável para sua pele. A utilização de água muito quente pode causar queimaduras.

## ESVAZIANDO O PRODUTO

Primeiramente, mova o botão de funções até a posição 0 (desligado) e desconecte o plugue da tomada.

Incline o produto até que toda a água seja evacuada.

**ATENÇÃO:** Retire a água com cuidado para que não molhe o botão de funções. Isso danificará o produto.

## ARMAZENAGEM E MANUTENÇÃO

**Limpeza:** A limpeza do produto deve ser feita com o produto frio e desligado (botão de funções posicionado na posição 0 e com o plugue desconectado da tomada). Para limpar, use apenas um pano úmido e um pano seco e limpo para secá-lo. Não use detergentes ou outros tipos de produtos de limpeza.

**Armazenagem:** O produto apenas deve ser guardado quando o mesmo estiver frio e seco. Guarde-o em uma caixa ou em um local limpo e seco.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Nome do produto: Foot Spa – Hidromassageador para pés
- Modelo e Voltagem: HC006 (127V) / HC007 (220V)
- Dimensões: 36 x 38 x 18cm
- Peso: 1,7 kg



## MANUAL EM OUTROS IDIOMAS

Para acessar a versão deste manual em Espanhol e Inglês, basta apontar a tela do seu smartphone para o QR Code abaixo:

***Para acceder a la versión en español e inglés de este manual, simplemente apunte la pantalla de su teléfono inteligente al código QR a continuación | To access the Spanish and English version of this manual, simply point your smartphone screen at the QR Code below:***



## TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multi para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multi.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multi projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multi limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multi pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº \_\_\_\_\_

Data da Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Queremos muito ouvir você!

CRM –Central de Relacionamento Multi Saúde

11 3198 - 5882 | Cobertura para todo Brasil

Fale conosco via WhatsApp!





# Multi

SAÚDE

Acompanhe a gente!

[multi.com.vc](http://multi.com.vc)

Instagram e Facebook: [@multisaude\\_br](https://www.instagram.com/multisaude_br)

YouTube: Multi Brasil

