



Manual
Cadeira de Banho
Supermedy
- Modelo B20



www.supermedy.com.br

INTRODUÇÃO

A Cadeira de banho Supermedy é indicado para possibilitar comodidade e segurança para as pessoas com limitações de movimento e equilíbrio durante o banho.

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA USO

Recomendamos que verifique se a cadeira para higienização está firmemente armada antes do uso, se os rodízios estão bem posicionados e girando livremente em todo o processo de uso. Para travar a cadeira, basta empurrar as travas dos freios.

Cuidados: Durante o banho, com o uso de shampoo e sabonetes, o assento pode se tornar escorregadio!

Importante: Ao sentar ou levantar da cadeira, mantenha os freios acionados.

Nunca utilize a cadeira sem que o apoio de pés esteja devidamente montado.

Manutenção:

1. Mantenha eixos, rolamentos das rodas e articulações lubrificados;
2. A secagem da sua cadeira de banho Supermedy é muito importante.
3. Evite deixar a cadeira exposta aos raios solares por longos períodos, isso evitará ressecamento e possíveis rachaduras de peças plásticas.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenamento: Deve ser armazenado em local com umidade relativa inferior à 80%, sem substâncias corrosivas e com boa ventilação.

Transporte: Pode ser conduzida por qualquer meio de transporte e não deve ser misturado com substâncias tóxicas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Capacidade maxima : 100 kg

INFORMAÇÕES GERAIS

Garantia : 3 meses contra defeito de fabricação

SAC: (11) 5012-3167

Site: www.supermedy.com.br

Resp .Téc : Jessica Sampaio Caldas – CRF-SP 90860

Numero de notificação junto á ANVISA: 80499940026

Importado por :Supermedy Importação e Exportação Eireli
Rua Manoel Jacomo 931 - Jd Angelina CEP 04.835-240
CNPJ : 08.308.147/0001-55

Fabricante : Hengshui Xinlei Medical Equipment Technology Co., Ltd.,

www.supermedy.com.br