


## COMO FAZER O AJUSTE DE ALTURA

Em postura ereta, ajuste a altura das muletas de forma que os cotovelos fiquem posicionados entre 20 e 30 graus de flexão (A). Ajuste a altura das muletas através do pino (B).

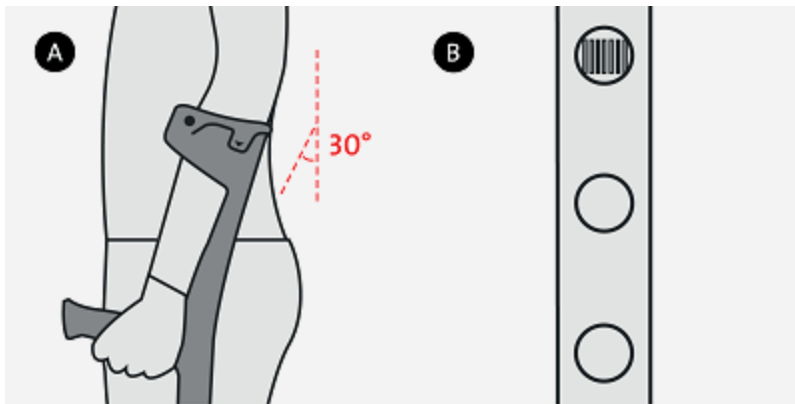

## COMO ACOPLAR AS MULETAS

O acoplamento permite encaixar uma muleta na outra, facilitando o uso em momentos nos quais há necessidade de uma das mãos livres, como subir escadas utilizando o corrimão, abrir portas e servir-se em restaurante. Encaixe uma das muletas de modo que o tubo fique à frente da muleta de apoio, seguindo a orientação abaixo.

