

Modo de usar

Imobilizador Ergonômico Longo para Joelho Estreito Mercur

Abra completamente todas as tiras e posicione o produto atrás da perna, de modo que as talas fiquem posicionadas na parte posterior e nas laterais, conforme imagem abaixo:



Em seguida, puxe a faixa elástica central **A** contornando o joelho e feche na altura da patela (rótula).

Após, ajuste as demais tiras, passando pelas fivelas plásticas, seguindo a ordem das mais próximas do joelho **B** para as extremidades **C**.

