

Modo de usar a Joelheira Ajustável com Hastes e Cintas de Compressão Mercur

1. Vista a joelheira na perna até a altura do joelho, passando o pé pelo tecido posterior que ajuda a posicionar e facilitar o fechamento. Posicione o reforço estofado (A) sobre a patela (rótula).
2. Puxe a cinta superior (B), passando por trás da perna e fixe-a na área frontal. Do mesmo modo, fixe a cinta inferior (C).



3. As cintas elásticas (D) podem ser tracionadas em diferentes intensidades e fixadas na parte frontal da joelheira de formas variadas, de acordo com a indicação de uso e compressão desejadas.



Opções de fechamento:

