


Modo de usar o Suporte Pélvico Flexível para Andador Posterior Mercur

Modo de fixar o suporte ao andador: Sugerimos o seguinte passo a passo:

1 - Posicione o lado mais estreito **A** do suporte voltando para a abertura do andador, mantenha a etiqueta Mercur voltada para baixo.

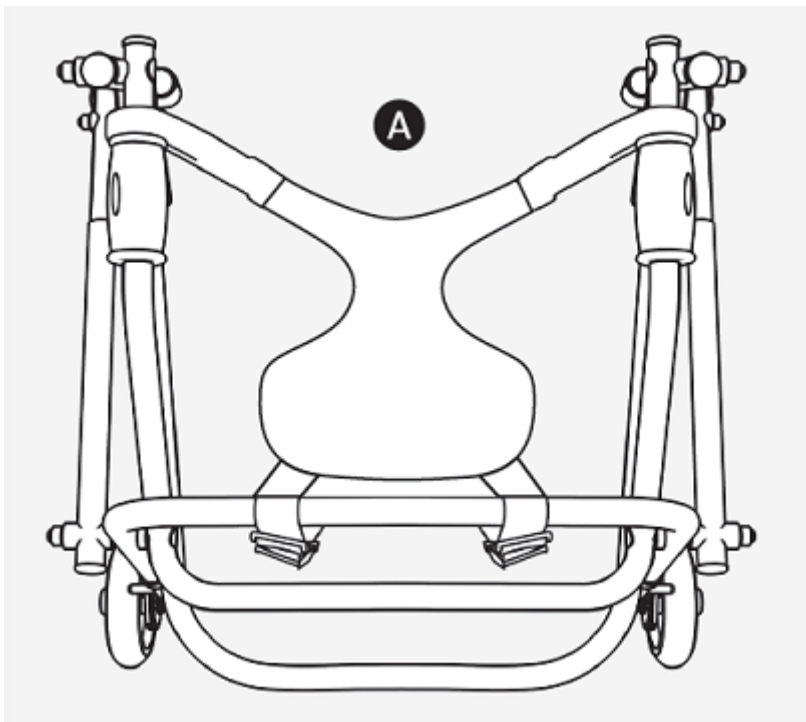

2 - Inicie passando as cintas de ajuste anteriores **B** nos tubos laterais, de modo que fiquem em frente aos apoios de mão **C**. Após, prenda as cintas através das fivelas de fixação **D**.

3 - Em seguida, passe as cintas de ajuste posteriores **E** no tubo posicionando nas costas do usuário (preferencialmente no mais próximo) **F** e prenda através das fivelas de fixação **D**.

Após, ajuste a regulagem das cintas até que o suporte esteja posicionado de acordo com a necessidade do usuário.

