

Modo de Usar

COMO POSICIONAR A TALA

O produto já vem pronto para uso na mão direita.

Se esse for o seu caso, siga as orientações de como vestir.

Para utilizar na mão esquerda, é necessário inverter a posição da tala inferior, conforme indicado abaixo.

1. Remova a tala inferior através da abertura lateral (A) e recoloca-a no sentido contrário, de forma que a curvatura da tala acompanhe a anatomia da palma da mão (conforme a imagem B).



Observação: quando o uso for na mão direita, a abertura da tala estará localizada na região mais próxima do antebraço, e quando for na mão esquerda, estará localizado na região mais próxima da mão.

(B)



COMO VESTIR O PRODUTO

1. Solte as tiras abrindo o produto e posicione-o no punho de forma que a curvatura da tala acompanhe a anatomia da palma da mão **(B)**.

Em seguida, vista o produto inserindo o polegar no orifício lateral **(C)**.



2. Apoiando o braço em uma superfície plana, fixe o fecho aderente mais próximo à mão **(D)**, ajustando a compressão de modo que fique firme e confortável.

Repita o processo com o fecho mais próximo do cotovelo **(E)**.

Por fim, ajuste a faixa elástica central, contornando o punho.

