

Modo de usar a Tipoia de Abdução Mercur

O uso deste produto precisa ser orientado por um profissional de saúde para que o ajuste seja adequado para cada necessidade.

A seguir, preparamos um passo a passo para auxiliar na colocação da tipoia.

Solte uma das fivelas da alça de ombro e um lado da cinta elástica abdominal, posicionando a almofada de abdução (coxim) **A** entre o braço e o tronco.

A almofada deve ser posicionada de modo que a parte anatômica fique em contato com o corpo.



Passe a alça **B** pelo ombro contrário à almofada, fixando-a através das fivelas da almofada de abdução.

Ajuste o comprimento da alça de ombro através das fivelas de regulagem.

Posicione o protetor de ombro próximo ao pescoço para maior conforto.



Com o cotovelo a 90°, posicione o antebraço centralizado no coxim e prenda-o através das tiras de fixação **C**, de modo que a tira maior fique mais próxima ao cotovelo.

Fixe a mão à tipoia através da tira de fixação para a mão **D**.



Passe a cinta abdominal elástica **E** contornando o corpo e fixando-a no coxim através dos fechos aderentes.



Colocação correta.

